



Rehataalkpad mit GoTalk NOW Weihnachtsrätsel

.....
Wann ist endlich Weihnachten? Die sehnsüchtige Frage zieht sich durch die gesamte Weihnachtszeit. Dieses Seitenset für GoTalk NOW beinhaltet neun Rätsel, die sich rund um das Thema Weihnachten drehen. Sie verkürzen die Wartezeit – und machen Spaß!



Import der Datei „rehavista-gtn-weihnachtsraetsel.gtbz“ in GoTalk NOW - so geht's:

- Zunächst müssen Sie die Datei „rehavista-gtn-weihnachtsraetsel.gtbz“ auf einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem auch „iTunes“ installiert ist.
- Nun verbinden Sie Ihr Rehataalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
- Anschließend öffnen Sie „iTunes“ und dort „Rehataalkpad“, dann gehen Sie auf „Apps“ und anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“.
- Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei mit der linken Maustaste anklicken und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus verschieben.
- Nun ist das Seitenset in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden.