



Tobii S32

Oberfläche Weihnachten

.....

In der Weihnachtszeit gibt es viele spannende Dinge zu erleben und zu erzählen. Um so wichtiger, dass auch im Advent Personen mit Sprachbeeinträchtigungen mitreden können. Um eine Unterhaltung interaktiv zu gestalten, sollten Sie dem Nutzer die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen („Wie findest du den Baum?“) und ihn oder sie außerdem ermutigen, witzige Kommentare oder Floskeln zu sagen („Du bekommst die Rute!“ / „Frohe Weihnachten!“).



Unsere Oberfläche für den Tobii S32 ist bereits fertig besprochen. Sie muss nur noch mit Ihrem Gerät synchronisiert werden.

Verwendung der Weihnachts-Oberfläche auf Ihrem Tobii S32 - so geht's:

- Laden Sie die Zip-Datei "s32-weihnachten.zip" von unserer Seite auf Ihren Computer
- Da es sich um eine Zip-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken: Doppelklick, dann "Alle extrahieren", "weiter", "weiter", dann "fertig stellen"
- Speichern Sie Seite „s32-weihnachten.smd“ unter "meine Symbolmate Seitensets" ab:
- Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen Sie "ausschneiden"
- Öffnen Sie den Ordner *Eigene Dateien* => *Bibliotheken* => *Dokumente* => *Meine Symbolmate*
- Klicken Sie erneut mit rechts in den Ordner und wählen Sie "Einfügen"
- Schließen Sie den S32 mittels USB-Kabel an den PC, öffnen Sie das Programm SymbolMate
- Wählen Sie "Tobii S32 Geräte", aktivieren Sie Ihr Gerät per Doppelklick
- Die Synchronisation zwischen PC und Gerät startet
- Links erscheint nun das Fenster der S32 Aktivitäten. Klicken Sie dort auf das grüne Plus-Feld
- Klicken Sie im neuen Fenster auf der linken Seite auf "durchsuchen"
- Klicken und nun die importierte Seite an und bestätigen Sie mit OK

...nun müssen Sie nur doch die Seite ausdrucken, laminieren und ausschneiden.

Der Tobii S32 erkennt automatisch die Informationen inkl. Sprachaufnahmen der Seite, wenn Sie sie in Ihr Gerät einlegen.

Frohe Weihnachten!