

Informationen zur Nutzung von Facebook ab Communicator Version 5.4.5

Da Facebook die Programmierschnittstelle regelmäßig neuen Sicherheitsänderungen unterzieht, ist es in Communicator 5 ab Version 5.4.5 nicht weiter möglich, ein integriertes Facebook-Seitenset anzubieten. Dieses betrifft sowohl das alleinige Facebook-Modul als auch das Seitenset in Sono Key. Der Anwender wird beim ersten Starten des jeweiligen Facebook-Seitensets auf die Änderung hingewiesen.

Tobii Dynamox bietet stattdessen in Communicator 5 ab Version 5.4.5 ein überarbeitetes Seiten-Set an, mit dem die Nutzung der gewöhnlichen Facebook-Seite im Internet-Browser über Felder auf der Seite und Mouseless Browsing ermöglicht wird. Über diesen Weg kann sichergestellt werden, dass Facebook auch in Zukunft uneingeschränkt verwendet werden kann.

Das neue Seitenset finden Sie unter Alle Seitensets > Textkommunikation > Fernkommunikation.

Bitte beachten Sie, dass auch das aktuelle Plugin zum Mouseless Browsing im Mozilla Firefox Browser installiert ist.

