



Predictable 5

Hinweise zum Update auf Version 5.2

In diesem Spickzettel stellen wir Ihnen die Änderungen in der Predictable Version 5.2 vor (verfügbar seit 10.01.2018). Insbesondere der Menüpunkt *Sprache* hat sich geändert, ggf. werden Sie aufgefordert, neue Stimmen herunterzuladen. Wir zeigen Ihnen im Folgenden, wie es geht!

1. Menüpunkt Sprache

Der Menüpunkt *Sprache* in den Einstellungen von Predictable ist ab Version 5.2 anders aufgebaut. Sie finden die verfügbaren Sprachen nun nach Nationalität sortiert.



Ggf. werden Sie aufgefordert, neue Stimmen herunterzuladen. Wählen Sie dazu zunächst Ihre Nationalität (z.B. Deutsch) aus. Die eingestellte Stimme ist mit einem blauen Häkchen markiert, neu verfügbare Stimmen sind mit einer Wolke gekennzeichnet:



Wenn Sie auf die Wolke drücken, erscheint die Meldung, dass die Stimme heruntergeladen werden muss. Anhand der Stimme Anna (erweitert) zeigen wir Ihnen, wie es geht (Achtung: Internetverbindung erforderlich!):

Wechseln Sie zu den Einstellungen Ihres REHAVISTA-Pads und wählen dort *Allgemein – Bedienungshilfen – Sprachausgabe – Stimmen – Deutsch – Anna – Anna (erweitert)* aus und drücken Sie dann auf die angezeigte Wolke; der Download startet nun. Sobald der Download abgeschlossen ist, wechseln Sie wieder zu Predictable. Die Stimme ist nun dort verfügbar und kann ausgewählt werden.

- weiter auf Seite 2 -



Wenn Sie die Einstellungen zur ausgewählten Stimme verändern möchten, drücken Sie auf dieses Symbol oben rechts im Menüpunkt *Sprache*:



Hier können Sie die Stimmparameter Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe, Sprachoptionen und benutzerdefinierte Wörter verändern und einstellen.

2. Menüpunkt Mitteilungen

Der Menüpunkt *Mitteilungen* ist nun nicht mehr im Menüpunkt *Über Predictable* integriert, sondern als eigener Menüpunkt in der Liste zu finden. Hier platziert der Hersteller relevante Informationen wie zum Beispiel Versionshinweise oder kurze Anleitungen zu Funktionen der App.

3. Wichtiger Hinweis:

Falls Sie nach dem Update keine Schrift im Nachrichtenfenster sehen, überprüfen Sie bitte die Einstellungen für die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe im Nachrichtenfenster (standardmäßig ist die Schriftfarbe schwarz, der Hintergrund weiß eingestellt). Dies geht in den Einstellungen von Predictable im Menüpunkt *Layout – Erscheinungsbild – Nachrichtenfenster*.