



# Letterpad


## Hinweis zum Update auf iOS 11.3

**Mit dem Update auf iOS Version 11.3 müssen ggf. die Stimmparameter für die ausgewählte Stimme in Predictable neu eingestellt werden, da die Stimme zu hoch sein könnte. Um die Stimmhöhe wieder korrekt einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:**

Rufen Sie die Einstellungen in Predictable auf (über das Zahnrad auf der Tastatur), wählen Sie anschließend den Menüpunkt *Sprache*. Über den Einstellungs-Button oben rechts gelangen Sie in den Bereich, in dem Sie die Tonhöhe anpassen können.



Ziehen Sie hier den Regler für die Tonhöhe an die gewünschte Position:

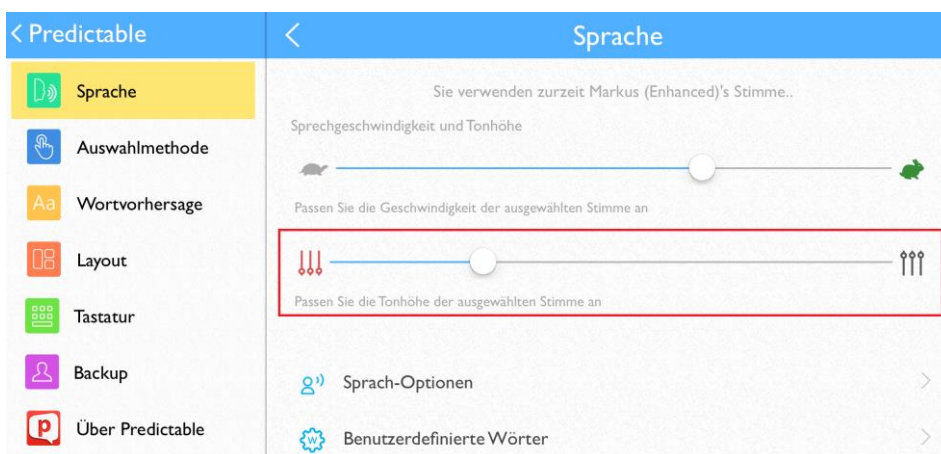

Ihre Stimme ist nun in der gewohnten Qualität wieder verfügbar, Sie können das Menü verlassen.