



Snap + CF Schützenfest

Sommerzeit ist auch Schützenfestzeit. Mit dem entsprechenden Vokabular können auch unterstützt kommunizierende Kommandanten, Batallionsmitglieder und Besucher an dem bunten Treiben teilhaben und so das regionale Brauchtum pflegen.



Wir stellen Ihnen eine PCS-symbolbasierte Seite passend für bis zu 8x10 Feldern Snap + CF für die Software Snap und CF zur Verfügung.

Ergänzen Sie einfach regionale Besonderheiten und schon kann es losgehen.

Die Seite eignet sich z.B. gut für die Einbindung in den Listen der Kernwörter unter „Ereignisse“ -> „zugehörige Liste“.

So geht's:

Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:

- Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick und verbinden ihn mit dem Gerät.
- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus.
- Wählen Sie den Reiter „Seite“.
- Klicken Sie auf „Seiten importieren/exportieren“ am linken Bildrand.
- Wählen Sie hier „Seitenpaket importieren“ -> „von lokaler Datei“ und navigieren Sie zu der Datei auf dem Stick.
- Markieren Sie diese und klicken Sie „weiter“.
- Bestätigen Sie mit „fertig“

Das Seitenset ist nun in Ihrem aktuellen Benutzer importiert.

Import der Datei Snap und CF auf einem Kompaktdisk – so geht's:

Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:

- Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie die Datei in Ihrem MyTobiiDynavox-Account:
Melden Sie sich dazu in einem Browser mit Ihrem Account an und gehen Sie in den Bereich „Snap“ -> „Seitensets“ -> „Seitenset hochladen“. indem Sie auf „durchsuchen“ klicken, können Sie den Speicherort der Datei aufrufen.



- weiter auf Seite 2 -

- Markieren Sie die Datei und wählen Sie „*öffnen*“.
- Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit „*hochladen*“.

Nun ist die Datei in Ihrem Account verfügbar und kann auf ein Kompad, das mit dem Account verknüpft ist, geladen werden:

- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus
- Wählen Sie den Reiter „*Seite*“.
- Klicken Sie auf „*Seiten importieren/exportieren*“ am linken Bildrand.
- Wählen Sie hier „*Seitenpaket importieren*“ -> „*von mytobiidynavox*“ und navigieren Sie zu der Datei.
- Markieren Sie diese und klicken Sie „*weiter*“.
- Bestätigen Sie mit „*fertig*“.

Das Seitenset ist nun in Ihrem aktuellen Benutzer importiert

Verknüpfen Sie die Seite mit Ihrer bestehenden Oberfläche

Navigieren Sie zu der Stelle, mit der die Seite verknüpft werden soll (TIPP: *Listen* -> *Ereignisse* -> *zugehörige Listen*).

- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus
- Markieren Sie das zu befüllende Feld.
- Wählen Sie den Reiter „*Feld*“ und passen Sie die Bezeichnung und das Symbol entsprechend an.
- Wählen Sie nun „*Verknüpfung zu Seite*“ und dann „*Link zu bestehender Seite*“
- In der Seitenliste wählen Sie „*Schützenfest*“ und bestätigen Sie mit „*erstellen*“.
- Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus mit „*Fertig*“.

Das Seitenset ist nun importiert und mit Ihrer Oberfläche verknüpft. Nun können Sie die noch leeren Türchen nach Lust und Laune bestücken!