



Spickzettel: Grid 3 - Das Smartbox-Konto

Mit einem Smartbox-Konto können verschiedene Funktionen in Grid genutzt werden wie die Remote-Bearbeitung, die Online-Synchronisation von Nutzerdaten sowie das Teilen von Seitensets als Online-Grids.

Erstellen eines Smartbox-Kontos

Wechseln Sie in die **Einstellungen (F10)**, wählen Sie **Konten** und dann **Smartbox**. Um ein neues Konto anzulegen, wählen Sie **Erstellen**. Geben Sie dann die erforderlichen Daten ein und bestätigen mit **Benutzerkonto erstellen**.

Sara
Eingabeinstellungen
Sprachausgabe
Schreiben
Symbole
Konten
Kontakte
Internet
Seitenset
Telefon
Computer
Umfeldsteuerung
Lizenzen

Ihr Smartbox-Konto

Erstellen Sie Ihr Smartbox-Konto, um sich auf mehreren Geräten anzumelden und Seitensets mit der Online-Grids-Community zu teilen

E-Mail-Adresse
sara.brenner@rehavista.de

Wählen Sie Ihr Passwort

Wiederholen Sie Ihr Passwort

Nein Ja Halten Sie mich mit Neuigkeiten über Grid 3 und Smartbox auf dem Laufenden

Durch Anklicken von Benutzerkonto erstellen stimmen Sie [Nutzungsbedingungen](#) and [Datenschutzrichtlinie](#) zu.

Benutzerkonto erstellen Abbrechen

Am Smartbox-Konto anmelden

Wechseln Sie in die **Einstellungen (F10)**, wählen Sie **Konten** und dann **Smartbox**. Hier können Sie Ihr vorhandenes Smartbox-Konto **Anmelden**.

Verbinden eines Kontos bei Dropbox

Dropbox ist ein frei verfügbarer Dienst, über den man Daten online speichern und zwischen Geräten synchronisieren kann. Grid verwendet Dropbox für die Remote-Bearbeitung. Wählen Sie in den Konten **Dropbox - Verbinden**.

Sollten Sie schon eine Dropbox eingerichtet haben, verbinden Sie an dieser Stelle einfach Ihr Dropbox-Konto. Sie können aber auch von hier aus ein Dropbox-Konto erstellen.

Dropbox

Smartbox

Melden Sie sich bei Dropbox an, um eine Verknüpfung mit Smartbox Grids herzustellen

Mit Google anmelden
Mit Apple anmelden
oder
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen?

Abbrechen **Zulassen**

Neu bei Dropbox? jetz Konto erstellen



Nach erfolgreicher Verknüpfung Ihres Dropbox-Kontos in Grid 3 müssen Sie noch **Zulassen**, dass die Software auf den eigenen Ordner in der Dropbox zugreifen darf. Dort werden die Seitensets zur Remote-Bearbeitung gespeichert.

Jetzt ist Dropbox erfolgreich mit Grid 3 verknüpft und Sie können die Remote-Bearbeitung einrichten!

Remote-Bearbeitung einrichten

Um jemandem die Remote-Bearbeitung Ihrer Seitensets zu ermöglichen, sind Registrierungen für ein Smartbox- sowie ein Dropbox-Konto erforderlich. Die Remote-Bearbeitung ermöglicht es anderen Personen (z.B. PädagogInnen, TherapeutInnen), Ihre Seitensets von einem anderen Computer aus zu bearbeiten. Um jemandem die Remote-Bearbeitung zu ermöglichen, gehen Sie in die **Einstellungen - Konten - Remote - Bearbeiter**. Geben Sie die E-Mail-Adresse des/der gewünschten Bearbeitenden ein und klicken Sie **Hinzufügen**.

Diese Person erhält daraufhin eine E-Mail mit dem Hinweis, dass sie als Remote-BearbeiterIn für Ihre Seitensets freigeschaltet ist und wird gebeten, Grid zu installieren und ein Smartbox-Konto zu erstellen.

Hinweis: Man benötigt keine Grid-Lizenz, um die Seitensets von jemand anderem zu bearbeiten!

Die Seitensets von anderen Grid-NutzerInnen bearbeiten

Wenn Sie die Berechtigung zur Remote-Bearbeitung per E-Mail erhalten haben, starten Sie Grid (falls erforderlich laden Sie sich die Software zunächst herunter, der Link ist in der E-Mail zu finden).

Wählen Sie Remote-Bearbeitung auf dem Startbildschirm und loggen sich in Ihr Smartbox-Konto ein. Falls Sie noch kein Smartbox-Konto haben, können Sie hier auch eines anlegen.

Benutzer
Remote-Bearbeitung
Hilfe

Remote-Bearbeitung

Melden Sie sich in Ihr Smartbox-Konto an, um Seitensets Remote zu bearbeiten.

E-Mail
sie@beispiel.de

Passwort
Passwort

Kein Smartbox-Konto? [Anmelden](#)

Es erscheint eine Liste mit NutzerInnen, die Ihnen die Freigabe zur Remote-Bearbeitung gegeben haben. Wählen Sie den gewünschten Nutzer / die gewünschte Nutzerin aus. Sie gelangen zu **Meine Seiten** des Nutzers / der Nutzerin. Von dort aus können Sie Seitensets hinzufügen und bearbeiten.

Hinweis: Bei bestehender Internetverbindung werden Ihre Änderungen sofort übertragen. Sollte sich der/die NutzerIn jedoch gerade im bearbeiteten Seitenset befinden, erhält er/sie eine Meldung, dass eine aktuellere Version des Seitensets verfügbar ist. Die Änderungen werden dann beim erneuten Öffnen des Seitensets übertragen.