



Spickzettel:Grid 3 - Seitenverknüpfungen

Ein Gehe zu-Feld ermöglicht das Wechseln von Seiten innerhalb eines Seitensets. Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten, in Feldern Verknüpfungen zu neuen oder bestehenden Seiten hinzuzufügen.

Wechseln Sie zunächst auf der Seite, auf der einem Feld eine Verknüpfung hinzugefügt werden soll, zu **Seite bearbeiten**: Drücken Sie dazu **F11** oder gehen Sie über die Menüzeile zum Menüpunkt **Seite bearbeiten**. Sollte die Menüzeile ausgeblendet sein, blenden Sie diese mit **F12** wieder ein.

Ein Gehe zu-Feld erstellen

Markieren Sie ein Feld und drücken Sie **Strg J**, um eine Verknüpfung zum Feld hinzuzufügen.

Alternativ können Sie nach Markieren des Feldes auch **Einen Befehl hinzufügen** wählen, den Befehl **Gehe zu** markieren und mit **Weiter** bestätigen.



In der Liste können Sie nun die gewünschte Seite, die geöffnet werden soll, auswählen und mit **OK** bestätigen.

Eine neue Seite oder Seitenkopie verknüpfen

Statt zu einer vorhandenen Seite können Sie den **Gehe zu**-Befehl auch einfach zu einer neuen Seite erstellen.

Wählen Sie dazu im Menü **Gehe zu** einfach **Neue Seite**. Sie können die Anzahl der Zeilen und Spalten bestimmen und einen Namen für die Seite vergeben. Bestätigen Sie mit **OK**.

Alternativ können Sie auch eine Seite, die Ihnen gefällt und ggf. schon einige sinnvolle Inhalte enthält, kopieren. Markieren Sie dazu im Menü **Gehe zu** die zu kopierende Seite und wählen dann **Seite kopieren**. Auch hier empfiehlt es sich, einen sinnvollen Namen für die neue Seite zu vergeben. Bestätigen Sie mit **OK**.



Hinweis: Auf allen neu erstellten Seiten befindet sich bereits ein **Zurück-Feld**, so dass Sie von der neu erstellten Seite auch jederzeit wieder zurück zur vorherigen Seite kommen.

Verknüpfung zur Startseite oder zurück

Diese beiden Verknüpfungsfelder führen entweder zur Startseite oder zur vorher besuchten Rasterseite.

Tipps: Seitenwechsel im Bearbeitungsmodus

Wenn man ein Feld markiert hat, kann man über die Tastenkombination **Strg F** der hinterlegten Verknüpfung folgen. Alternativ klickt man am linken Bildschirmrand beim Gehe zu-Befehl auf **Der Verknüpfung folgen**.

