



Spickzettel:Grid 3 - Tastaturkürzel

In Grid 3 kann man eine Reihe sinnvoller Tastaturkürzel verwenden, die die Nutzung und Bearbeitung der Software vereinfachen und beschleunigen.

Tastaturkürzel für den Nutzermodus

- **F9:** Wort finden
- **F10:** Einstellungen öffnen
- **F11:** In den Bearbeitungsmodus wechseln/ Bearbeitungsmodus beenden
- **F12:** Menüleiste ein- bzw. ausblenden

Tastaturkürzel für den Bearbeitungsmodus

- **F11:** In den Bearbeitungsmodus wechseln/ Bearbeitungsmodus beenden
- **Strg X:** Ein Element ausschneiden
- **Strg C:** Ein Element kopieren
- **Strg V:** Ein Element einfügen
- **Strg Z:** letzte Aktion rückgängig machen
- **Strg A:** Alle Elemente auswählen
- **Strg D:** Alle Elemente abwählen
- **Strg J:** "Gehe zu" als Aktion zu einer Taste hinzufügen
- **Strg F:** "Gehe zu" - Aktion ausführen (Seite öffnen)
- **Strg W:** "Schreiben" als Aktion zu einer Taste hinzufügen (Schreibfeld erstellen)

- **Pfeiltasten:** Navigieren innerhalb der Felder (+ Umschalttaste: markieren von Feldern)
- **Enter:** Feld erstellen (auf leerem Feld)
- **Einfügen (Einfg):** Befehl hinzufügen (oder Feld erstellen bei leerem Feld)
- **Entfernen (Entf):** Feld löschen

- **F1:** Hilfe öffnen
- **F2:** Beschriftung ändern
- **F3:** Bild finden
- **F4:** Bild bearbeiten
- **F5:** Bild löschen
- **F9:** Wort finden (im Nutzermodus)
- **F10:** Einstellungen öffnen
- **F12:** Menüleiste ein- bzw. ausblenden

- **Alt:** blendet Buchstaben ein, so dass man die Menüs per Tastatur bedienen kann