




Spickzettel:Grid 3 - Nutzersicherung


In diesem Spickzettel erklären wir Ihnen, wie man eine Sicherung eines gesamten Benutzers mit allen zugehörigen Einstellungen und Seitensets erstellt und diese Sicherung auch wieder in Grid 3 importiert.

Einen Benutzer sichern

Wechseln Sie in das Menü Einstellungen über die Taste **F10**. Alternativ können Sie die Einstellungen auch über das Menü oben links aufrufen. Falls die Menüleiste ausgeblendet sein sollte, drücken Sie F12 zum Einblenden der Menüleiste.

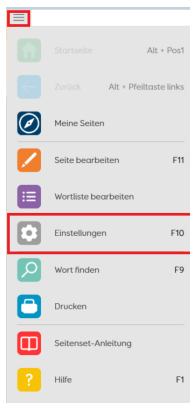

- Wählen Sie **Benutzer sichern** aus, danach den Speicherplatz, z.B. einen angeschlossenen USB-Stick.
- Der vom System vorgeschlagene Dateiname setzt sich aus dem Benutzernamen und dem Sicherungsdatum zusammen, Sie können diesen bei Bedarf ändern.
- Bestätigen Sie mit **Speichern** und danach mit **OK**.
- Ihr Benutzer wurde erfolgreich gesichert.

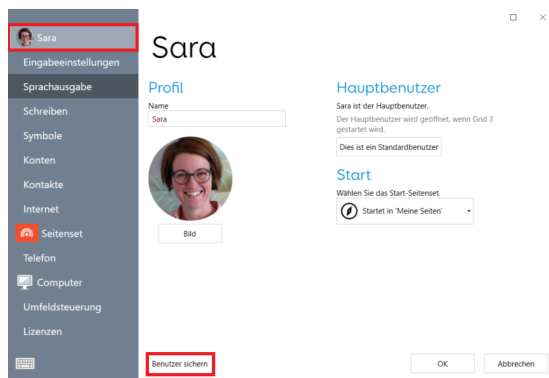


Tipp: In diesem Menü können Sie auch den Namen und das Bild für den Benutzer verändern!

Eine Benutzersicherung importieren


Soll eine Sicherungsdatei wieder in die Software Grid 3 importiert werden, gehen Sie wie folgt vor:




Wählen Sie auf dem Startbildschirm den Menüpunkt **Benutzer** aus, und dann **Benutzer importieren**. Falls die Menüzeile ausgeblendet sein sollte, drücken Sie F12 zum Einblenden der Menüzeile.

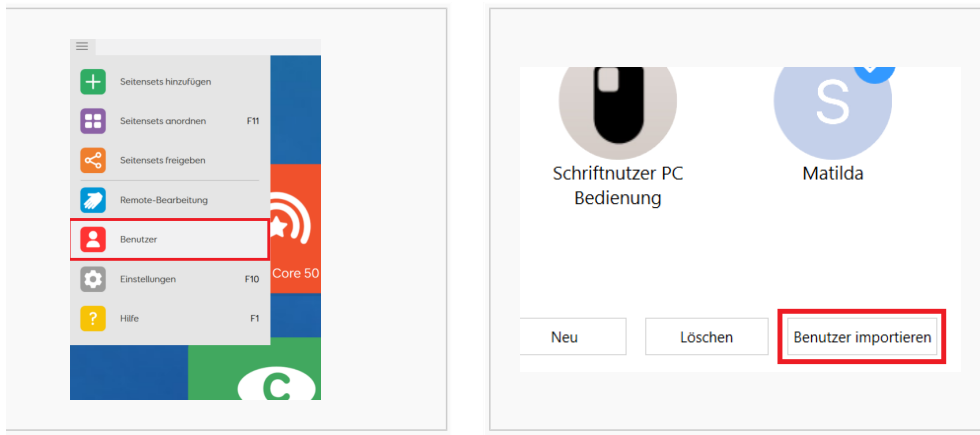

Wählen Sie dann das Grid 3 User-Backup, das Sie importieren möchten, aus und bestätigen Sie mit **Öffnen**.

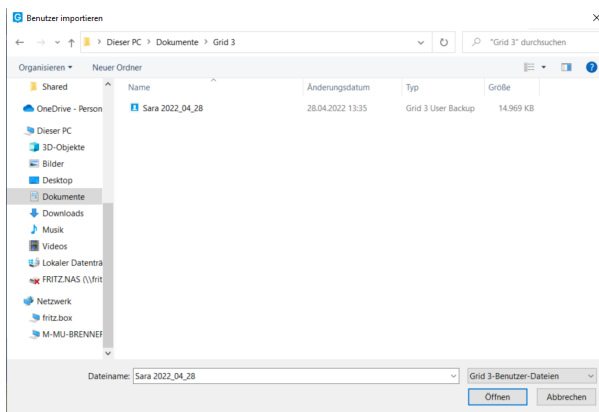

Der Nutzer wurde erfolgreich in die Grid 3 Software importiert und als zusätzlicher Nutzer hinzugefügt.

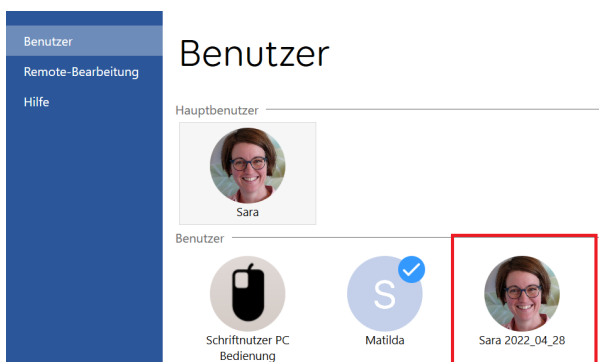

Tipp: Über das Menü Einstellungen (F10) können Sie den Namen und das Bild für den Benutzer ändern!