




# Juli-Idee

## Vitamine, Vitamine

.....

**Jetzt im Juli haben viele Früchte und Beeren wie Brombeeren und Pflaumen Saison; eine gute Gelegenheit für gesunde, leckere Fruchtsmoothies aus frischen Zutaten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an diesem kulinarischen Fruchtspaß auch motorisch und/oder sprachbeeinträchtigte Menschen, z. B. in der Schule oder Wohngruppe, teilhaben zu lassen.**

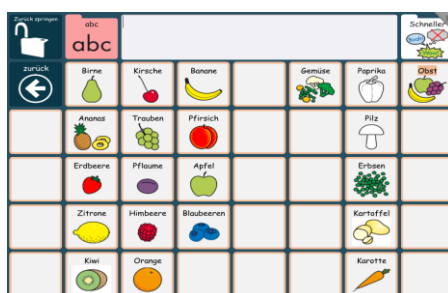

### So geht's:

Laden Sie die Vorlage für den Ablaufplan und die Obstauswahl für Boardmaker oder die PDF-Tafeln herunter, laminieren Sie die Kärtchen und schneiden sie dann aus. Anschließend wird Klett auf der Rückseite befestigt, damit die einzelnen Punkte auf einer Kletttafel angebracht werden können. Alternativ bieten wir Ihnen das Seitenset auch in einer Version für Compass an.

**Tipp:** Wenn Allergien bekannt sind, lassen Sie die entsprechenden Zutaten bei der Auswahl weg.

### Das benötigen Sie:

Klettmaterial oder eine dynamische Kommunikationshilfe mit Compass, z. B. Kompad, Mixer, Früchte, PowerLink, Taste

- weiter auf Seite 2 -



### **Importieren Sie die pak-Datei in Ihre Compass-Software. So geht's:**

- Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie „rehavista-compass-vitamine.zip“ zunächst entpacken:  
→ Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", weiter", "fertig stellen".
- Speichern Sie die entpackte Datei auf Ihrem USB-Stick und stecken Sie diesen in den USB-Port Ihres Kommunikationsgeräts.
- öffnen Sie in der Compass-Software das Setup.
- Wählen Sie den Button „Seitenverzeichnis“. Das Menü „Seitenverzeichnis“ wird geöffnet.
- Wählen Sie den Ordner aus, in den die Seiten des Packages importiert werden sollen.
- um das Package in einen neuen Ordner zu importieren, verfahren Sie wie folgt:  
→ wählen Sie den Button „Verwalten“ in der oberen rechten Ecke,  
→ dann den Button „Ordner neu“. Wenn Sie in das Namensfeld drücken, öffnet sich die Systemtastatur. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und bestätigen Sie mit „OK“.  
Der neue Ordner befindet sich nun in der Ansicht.
- Um das Package in einen vorhandenen Ordner zu importieren, verfahren Sie wie folgt:  
→ Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Seiten des Packages importieren möchten,  
→ dann den Button „Importieren“. Das Menü „Importiere Paket von...“ wird geöffnet.  
→ Wählen Sie den Button „Lokales Gerät“ aus. Das Menü „Import-Datei“ auswählen wird geöffnet.  
→ Wählen Sie nun den Speicherort des Packages aus. Mit dem Pfeil nach oben können Sie eine höhere Ordner Ebene anwählen. Der USB-Stick befindet sich in der höchsten Ordner Ebene.  
→ Klicken Sie das gewünschte Package aus und gehen anschließend auf „Auswählen“.  
→ Die Seiten aus dem Package werden nun importiert und im Seitenverzeichnis angezeigt.  
Hinweis: Nicht vergessen - verknüpfen Sie die Seite mit Ihrer bestehenden Oberfläche!