




# Snap + Core First

## Mein automatisches Fotoalbum

Fotoalben anzusehen ist nicht nur im Zusammenhang mit Biografiearbeit interessant. Gemeinsame Erinnerungen an Erlebnisse oder von besonderen Gegebenheiten zu berichten, macht allen Spaß – ganz gleich ob Jung und Alt.

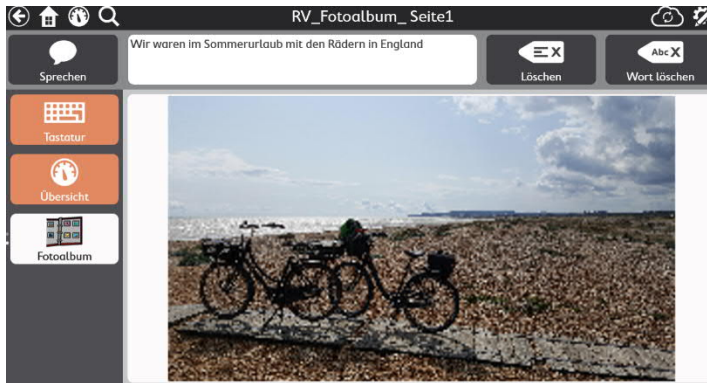

Wir stellen Ihnen ein Seitenset zur Verfügung, das in jede Rastergröße von Snap eingebunden werden kann.

Ganzseitig werden hier Fotos angezeigt und mit der von Ihnen hinterlegten Aufnahme vertont. Durch Druck auf den im

Nachrichtenfenster erscheinenden zugehörigen Text, kann dieser passend zum aktuellen Bild nochmals wiederholt werden. Drückt der Nutzer auf das Bild, wird automatisch zur nächsten Seite im Album weitergeblättert. Das Seitenset umfasst insgesamt Platz für 10 Fotos. Dieses Seitenset eignet sich z.B. gut für die Einbindung in der Navigationsleiste oder als Thema in „meine Themen“.

Hinweis: Ist der Anwender in der Lage, selbst die gewünschten Fotos zu öffnen, nutzen Sie bitte unseren Tipp „Mein Fotobuch“!

So geht's:

Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:

- Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick, verbinden ihn mit dem Gerät.
- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus.
- Wählen Sie den Reiter „Seite“.
- Klicken Sie auf „Seiten importieren/exportieren“ am linken Bildrand.
- Wählen Sie hier „Seitenpaket importieren“ -> „von lokaler Datei“ und navigieren Sie zu der Datei auf dem Stick.
- Markieren Sie diese und klicken Sie „weiter“.
- Bestätigen Sie mit „fertig“.

Das Seitenset ist nun in Ihrem aktuellen Benutzer importiert



Import der Datei Snap und CF auf einem Kompad – so geht's:

Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:

- Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
- Speichern Sie die Datei in Ihrem MyTobiiDynavox-Account:
- Melden Sie sich dazu in einem Browser in Ihrem Account an und gehen Sie in den Bereich „Snap“ -> „Seitensets“ -> „Seitenset hochladen“.
- Indem Sie auf „durchsuchen“ klicken, können Sie den Speicherort der Datei aufrufen.
- Markieren Sie die Datei und wählen Sie „öffnen“.
- Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit „hochladen“.

Nun ist die Datei in Ihrem Account verfügbar und kann auf ein Kompad, das mit dem Account verknüpft ist, geladen werden:

- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus.
- Wählen Sie den Reiter „Seite“.
- Klicken Sie auf „Seiten importieren/exportieren“ am linken Bildrand.
- Wählen Sie hier „Seitenpaket importieren“ -> „von mytobiidynavox“ und navigieren Sie zu der Datei.
- Markieren Sie diese und klicken Sie „weiter“.
- Bestätigen Sie mit „fertig“.

Das Seitenset ist nun in Ihrem aktuellen Benutzer importiert

Verknüpfen Sie die Seite mit Ihrer bestehenden Oberfläche

- Navigieren Sie zu der Stelle, mit der die Seite verknüpft werden soll (TIPP: Navigationsleiste oder Themen -> Meine Themen).
- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus.
- Markieren Sie das zu befüllende Feld.
- Wählen Sie den Reiter „Feld“ und passen Sie die Bezeichnung und das Symbol entsprechend an.
- Wählen Sie nun „Verknüpfung zu Seite“ und dann „Link zu bestehender Seite“.
- In der Seitenliste wählen Sie „rehavista-fotoalbum-automatisch“ und bestätigen Sie mit „erstellen“.
- Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus mit „fertig“.

Das Seitenset ist nun importiert und mit Ihrer Oberfläche verknüpft.



Fotos im Seitenset einfügen:

HINWEIS: Beim Umblättern der Seite wird automatisch der neue Text zum erscheinenden Foto vorgelesen. Damit dies funktionieren kann, muss der Text zu jedem Foto auf der vorhergehenden Seite bereits in die Mitteilung des Feldes geschrieben werden. Also: Das Feld auf der Seite 1 beinhaltet in der Mitteilung den Text passend zum Foto auf Seite 2. Bitte beachten Sie dies beim Eingeben der Mitteilungen während des Einrichtens des Seitensets damit die korrekten Mitteilungen zum richtigen Bild erscheinen können. Somit muss auf dem Feld der Startseite bereits die Mitteilung passend für das erste eingefügte Foto eingegeben werden. Die Seite 10 des Seitensets führt Sie automatisch zu der, von Ihnen definierten Startseite im Seitenset.

- Öffnen Sie die Startseite des Fotoseitensets.
- Wechseln Sie mit dem Zahnrad am oberen rechten Rand in den Bearbeitungsmodus.
- Markieren Sie das einzige Feld der Seite.
- Geben Sie nun in der Mitteilung den Text für das erste Foto, das auf der nächsten Seite erscheinen soll ein.
- Navigieren Sie zur nächsten Seite.
- Wählen Sie den Reiter „Feld“ -> „Inhalt“ und passen Sie die Bezeichnung (oder entfernen Sie diese) und das Foto an (mit dem „X“ in der Vorschau können Sie den Platzhalter entfernen und über das Kamerasymbol ein Foto einfügen).
- Geben Sie nun in der Mitteilung den Text für das zweite Foto, das auf der nächsten Seite erscheinen soll ein.
- Navigieren Sie zur nächsten Seite und wiederholen Sie von nun an die letzten Schritte, bis alle 10 Bilder und Mitteilungen eingefügt sind.