

Grid

Sommerferien

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Sicherlich bieten die schulfreien sechs Wochen eine Menge Zeit für schönen Dinge, die im Alltag oft zu kurz kommen. Mit unseren Kommunikationsseiten im Raster 4x4 mit METACOM-Symbolen können sich auch nichtsprechende Kinder über Themen rund um die Ferienzeit wie Zeugnis oder eine anstehende Urlaubsreise austauschen.

Außerdem finden Sie einen Ferienplan, mit dem die Aktivitäten der kommenden sechs Wochen übersichtlich dargestellt werden können, ein Seitenset zur Visualisierung der restlichen Fahrzeit sowie zwei Vorlagen für Fotoalben.



Sie finden unser Seitenset in den Online Grids.

Was sind Online Grids?

[Online Grids](#) sind der Ort, an dem Sie neue Inhalte für **Grid 3** und **Grid for iPad** entdecken und herunterladen können. Jeden Tag werden neue Grid-Sets von Expert:innen für Unterstützte Kommunikation und der Gemeinschaft von Grid-Nutzer:innen aus der ganzen Welt hinzugefügt. Unser Seitenset finden Sie dort ebenfalls, wenn Sie in die Suche „Sommerferien“ eingeben.

Wichtig zu wissen: Um die Online Grids zu nutzen, müssen Sie sich dort vorher [registrieren](#).

Hinweis:


Mit Ihrem Smartbox-Konto können Sie über die Online Grids Ihre mit Grid erstellten Seitensets mit der Smartbox-Community teilen. Die Seitensets sind öffentlich zugänglich, sobald sie über die Online Grids geteilt werden.

Auf den nächsten Seiten finden Sie Anleitungen, wie Sie die Seitensets in Grid 3 bzw. Grid for iPad einfügen.



Anleitung für Nutzer:innen von Grid 3:


Um zu dem Seitenset zu gelangen, müssen Sie Ihr Gerät zunächst mit dem **Internet** verbinden.

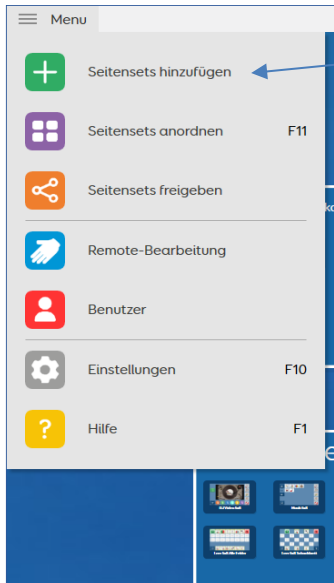

Klicken Sie oben links auf „Menü“ und dann „Seitensets hinzufügen“.



Wählen Sie unten rechts „Online Grids“ aus.

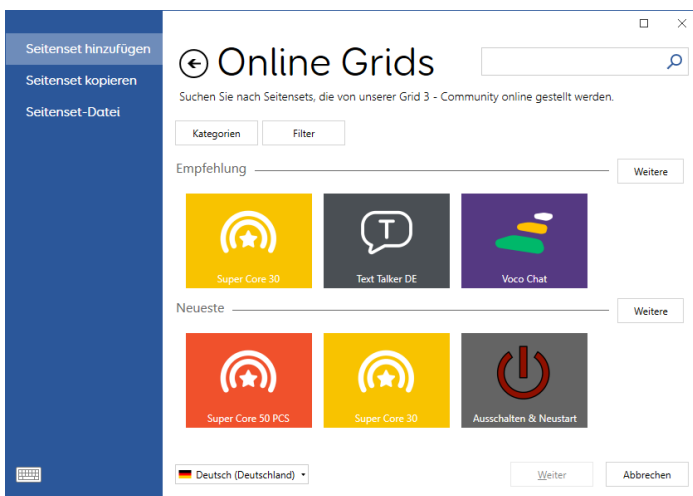


Das Seitenset finden Sie in den Bereichen „Empfehlung“ oder „Neueste“, bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.


Alternativ geben Sie Schlagwörter in die Suchfunktion ein.




Anleitung für Nutzer:innen von Grid for iPad:

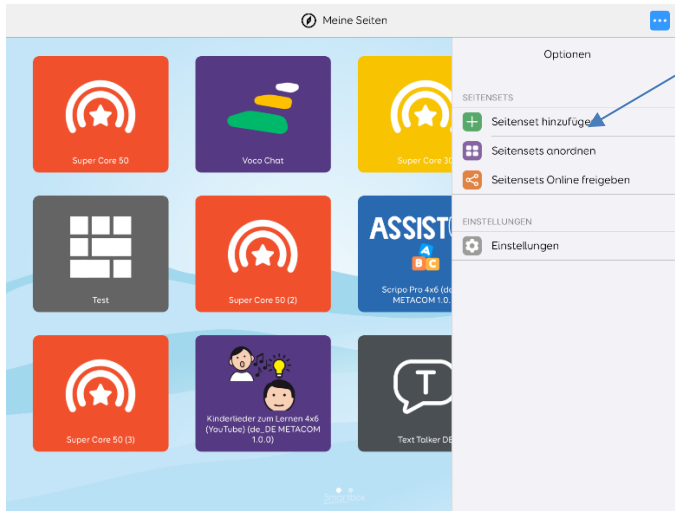

Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen dann „Seitensets hinzufügen“.

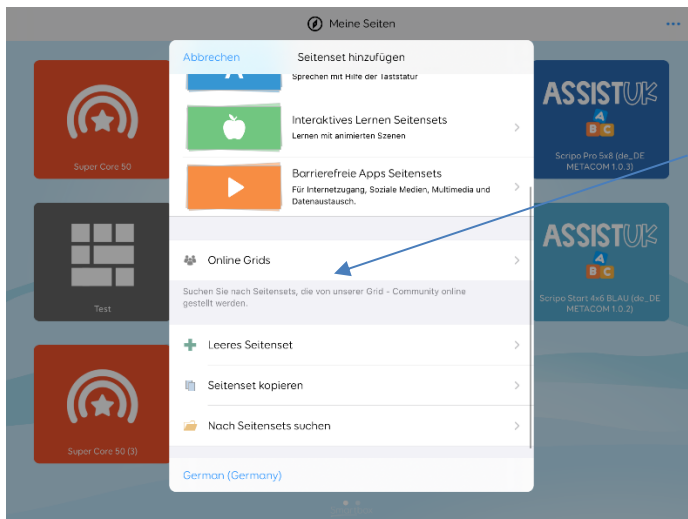

Scrollen Sie herunter und wählen Sie „Online Grids“ aus.

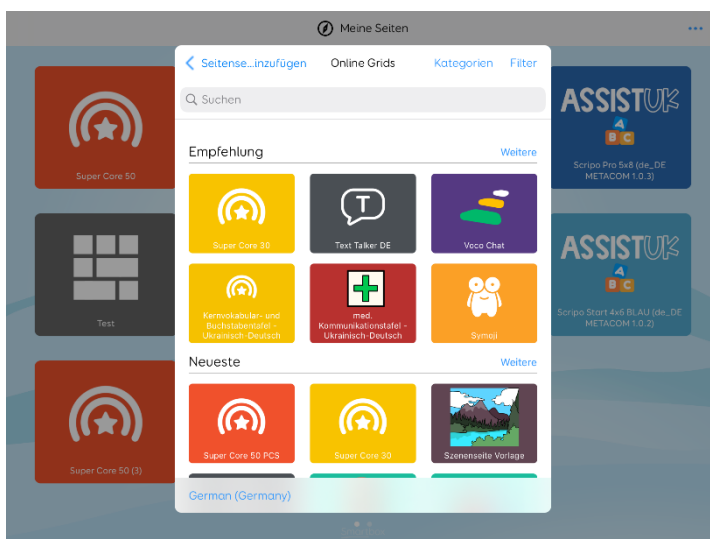

Das Seitenset finden Sie in den Bereichen „Empfehlung“ oder „Neueste“, bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.

Hinweis: Sie können alternativ auch über die Lupe mit Schlagwörtern nach dem Seitenset suchen.