



Tobii Dynavox Communicator 5 Startseite einstellen

Beim Starten des Anwenderprogramms Communicator 5 öffnet sich als Standard üblicherweise eine „Setup-Hilfe“ zur Erstellung eines neuen Benutzers.



Startseite im Communicator festlegen, so geht's:

- Geben Sie dem Benutzerprofil einen Namen und wählen Sie dann die Stimme aus.
- Wechseln Sie, falls notwendig, die Eingabemethode (z.B. auf Touch).
- Anschließend drücken Sie auf „Weiter“.
- Es öffnet sich die Auswahl der Kommunikationsstufe:





- Hier wird mit der Kommunikationsstufe eine Beispielstartseite erstellt, die dann noch weiter bearbeitet werden kann. (Im Beispiel „Symbolkommunikation“)
Mit „weiter“ und „abschließen“ kommen Sie nun zur erstellten Startseite.



- Um das Angebot für den Nutzer zu reduzieren, öffnen Sie mit einem rechten Mausklick das „Caregiver-Menü“.



- Hier wählen Sie „Startseite bearbeiten“. Diese Schritte ersetzen den „Einrichtungsassistenten“ aus dem Tobii Communicator 4.



- Mit dem Anklicken eines Seitensets bieten sich nun folgende Möglichkeiten: Verschieben nach rechts oder links, als Startseite festlegen oder entfernen des Seitensets von der Startseite.
- Außerdem können Sie hier noch Seitensets hinzufügen (auch aus anderen Kommunikationsstufen oder eigene Seitensets), die Hintergrundfarbe ändern oder das Raster der Startseite verändern.

Tipp: Nicht verwendete Seitensets sollten auf jeden Fall entfernt werden, um die NutzerInnen nicht zu verwirren.