



Spickzettel: Grid 3 - Das Erscheinungsbild eines Feldes ändern

Grid bietet eine ganze Reihe von Werkzeugen, um unter Eigenschaften das Erscheinungsbild und den Stil eines Feldes zu ändern, z.B. durch Farben und Formen. Auch Schriften stehen in verschiedenen Arten und Größen zur Verfügung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die wichtigsten Parameter eines Feldes verändern können.

Wählen Sie die Seite aus, auf der Sie eines oder mehrere Felder verändern möchten und wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus (**F11**). Mehrere Felder können Sie wie folgt auswählen: Die Taste **Strg** gedrückt halten und die gewünschten Felder anklicken.

Bilder und Beschriftung

Klicken Sie das Feld an, bei dem Sie das Bild bzw. die Beschriftung ändern oder hinzufügen möchten. Wählen Sie Beschriftung ändern und geben Sie den gewünschten Text ein. Es werden Ihnen dann in der Menüzeile passende Symbole vorgeschlagen, aus denen Sie eines auswählen können.



Sollte kein passendes Symbol angezeigt werden, haben Sie die Möglichkeit, über **Bild finden** ein anderes Symbol oder Foto zum Feld hinzuzufügen.



- **Symbole:** Durch Eingabe eines Suchbegriffs werden alle installierten Symbol-Datenbanken nach passenden Symbolen durchsucht.
- **Bild-Datei:** Zugriff auf den Windows-Explorer, so dass ein Bild aus einem Ordner eingefügt werden kann.
- **Web-Suche:** Durch Eingabe eines Suchbegriffs wird das Internet nach passenden Symbolen und Fotos durchsucht.
- **Kamera:** Macht ein Foto mit der integrierten Kamera.



- **Bildschirmausdruck:** Ermöglicht es, einen Screenshot in ein Feld einzufügen. Den gewünschten Bildschirmausschnitt dazu einfach mit der Maus definieren.

Formen und Farben

Wählen Sie den Reiter **Eigenschaften** aus. Hier können Sie für verschiedenste Elemente Farben und Formen ändern.




- **Form:** Ändert die Form eines bzw. mehrerer Felder; so können z.B. abgeknickte Ecken auf einen Seitenwechsel hinweisen.
- **Füllen:** Ändert die Felderfarbe
- **Rahmen:** Ändert die Rahmenfarbe
- **Rand:** Ändert die Farbe des Hintergrundes
- **Schriftart:** Ändert die Schriftart auf den ausgewählten Feldern.
- **Größe:** Ändert die Schriftgröße auf den Feldern. Die Symbolgröße wird automatisch angepasst.
- **Farbe:** Ändert die Schriftfarbe.

Tipp: Neben den vorgeschlagenen Farben können Sie über **Farbe einstellen** und **Finden** individuelle Farben auswählen. Mit der Pipette bei Finden können Sie einen Farbton, der sich irgendwo anders, z.B. in einem Symbol oder auf einer Website befindet, auswählen.

Design

Das Werkzeug **Design** ändert mit einem Klick das gesamte Erscheinungsbild des Seitensets. Dies ermöglicht, das Seitenset eher kind- oder erwachsenengerecht erscheinen zu lassen. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Designs. Wenn Sie mit der Maus über die Designvorschläge fahren, wird eine Vorschau angezeigt.

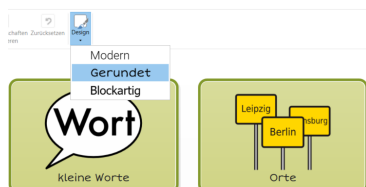



Bearbeiten beenden

Zum Beenden der Bearbeitung einfach mit **F11** den Bearbeitungsmodus verlassen bzw. in der Menüzeile **Bearbeiten beenden** wählen. Sie werden dann noch gefragt, ob Sie Ihre Änderungen im Seitenset speichern möchten. Bestätigen Sie dies, ansonsten gehen die Änderungen verloren.