


Kurzanleitung

TalkTrac™ tragbare Kommunikationshilfe

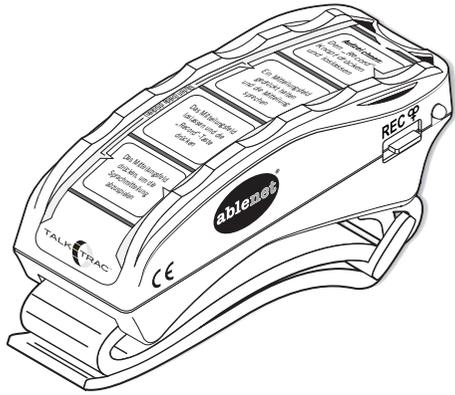


- Acht 10 Sekunden lange Sprachmitteilungen
- Zwei Stufen mit jeweils 4 Sprachmitteilungen
- Zwei Lautstärken
- Aufladbar




www.ablenetinc.com

Überblick

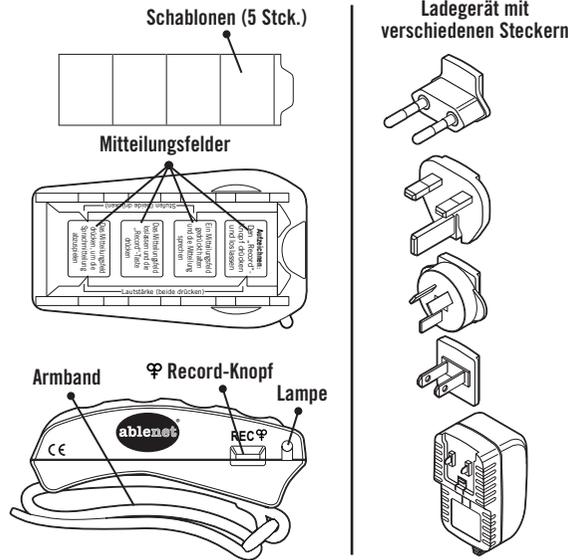

HINWEIS: Das Armband kann durch Standardarmbänder ersetzt werden.

Sprachmitteilungen aufzeichnen und abspielen

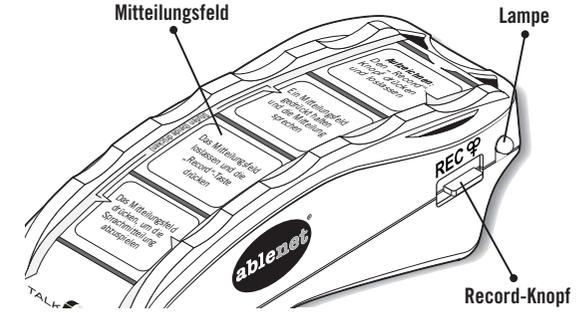


Aufzeichnen einer Sprachmitteilung

1. Die RECORD-Taste drücken und loslassen (rote Lampe leuchtet).
2. Ein Mitteilungsfeld gedrückt halten (die Lampe blinkt rot) und die Mitteilung sprechen.
3. Die RECORD-Taste drücken und loslassen (Lampe erlischt).

Abspielen einer Sprachmitteilung

Das Mitteilungsfeld drücken und loslassen.

Laustärke und Stufen ändern

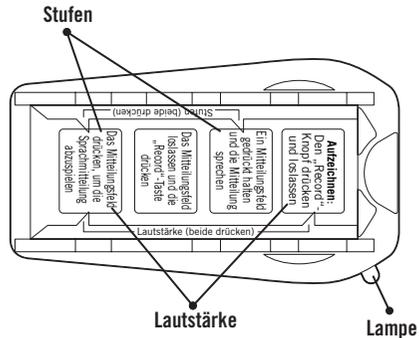


Ändern der Lautstärke

Die beiden abgebildeten Lautstärkenfelder drücken.

Ändern der Stufen

Die beiden abgebildeten Stufenfelder drücken (die grüne Lampe blinkt für Stufe 1 oder 2).

Laden und schwache Batterie

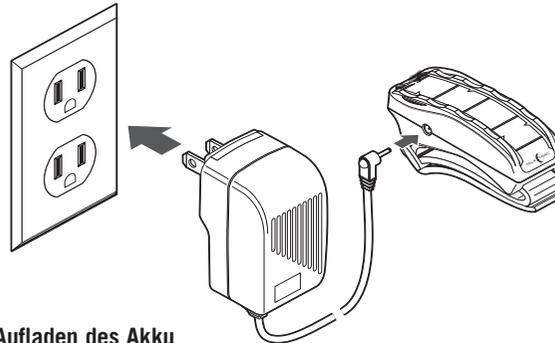

Aufladen des Akku

Den Akku jeden Abend aufladen, damit dieser immer vollständig geladen ist.

HINWEIS: Vor der ersten Benutzung des Geräts muss der Akku 24 Stunden aufgeladen werden.

Warnung bei schwacher Batterie

Nach der Wiedergabe einer Sprachmitteilung blinkt die TalkTrac Kommunikationshilfe mehrmals rot. Dies weist auf eine schwächer werdende Batterieladung hin und der Akku muss bald aufgeladen werden.

Schablonen / Garantie und Kontaktinformationen

Schablonen

Mithilfe der Mayer-Johnson® Boardmaker-Software oder durch Herunterladen einer Blankovorlage von der AbleNet Website lassen sich zusätzliche Schablonen erstellen.

Hinweise zur Garantie/Reparatur/Rücksendung

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie kann auf www.ablenetinc.com eingesehen werden.

Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (USA und Kanada)
Internet: www.ablenetinc.com



www.ablenetinc.com