


SimplyWorks®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Simple Switch Interface

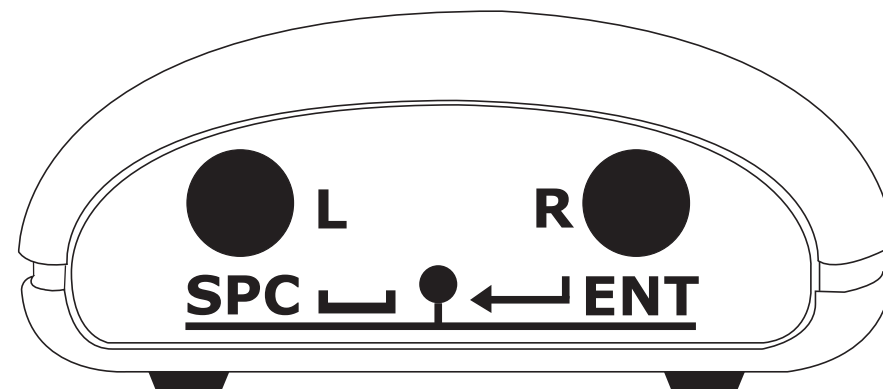

Lieferumfang
Bitte auf Vollständigkeit
prüfen:

Simple Switch Interface
Diese Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Simple Switch Interface ist eine einfache und günstige Möglichkeit bis zu zwei Taster mit einem Computer zu verbinden, um damit viele barrierefreie Softwareprogramme bedienen zu können. Das Gerät kann so eingestellt werden, dass die beiden Taster die Leer- und die Enter-Taste oder den linken und den rechten Mausklick ersetzen können.

© für die deutsche Übersetzung:
REHAVISTA GmbH
Forckenbeckstraße 9-13
14199 Berlin

Pretorian
TECHNOLOGIES LTD.

Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB United Kingdom
Tel +44 (0) 1427 678990 Fax +44 (0) 1427 678992

SimplyWorks® is a registered trademark of Pretorian Technologies Ltd.

www.pretorianuk.com

Produktmerkmale

- USB-Anschluss
- Keine zusätzlichen Software-Treiber erforderlich.
- PC- und Mac-kompatibel.
- Unterstützt Leer-/Enter-Taste und linken/rechten Mausklick.
- Speichert die Einstellung auch ausgeschaltet.

Kompatibilität

Simple Switch Interface ist kompatibel mit allen PC- und Mac-Computern, die über einen USB-Anschluss verfügen. Dieses Gerät ist nicht zum Anschluss an eine PS/2-Buchse geeignet und funktioniert auch nicht über einen Kabeladapter PS/2-USB am Computer, da es Funktionen nutzt, die nicht über die herkömmlichen PS/2-Anschlüsse verfügbar sind.

Installation

Schalten Sie den Computer ein und warten Sie den vollständigen Startvorgang des Betriebssystems ab. Wählen Sie einen freien USB-Anschluss am Computer und stecken Sie das Kabel des Simple Switch Interface in die gewählte USB-Buchse. Das Gerät wird vom Computer automatisch erkannt und die notwendigen Treiber geladen. Danach wird das Betriebssystem Ihnen die erfolgreiche Installation anzeigen. Simple Switch Interface ist nun betriebsbereit.

Einstellungen

Die rote Kontrollleuchte (LED) auf der Frontseite des Gerätes (A in Abbildung 1) zeigt an, ob nach Auslösen der Taster die Funktionalität der Leer-/Enter-Taste oder der linke/rechte Mausklick eingestellt ist. Die folgende Tabelle zeigt die jeweilige Funktion der Klinkenbuchsen:

LED	linke Klinkenbuchse	rechte Klinkenbuchse
aus	linker Mausklick	rechter Mausklick
ein	Leer-Taste	Enter-Taste

Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie den Taster auf der Unterseite des Gerätes (B in Abbildung 2). Die neue Einstellung ist im Gerät gespeichert und wird nach dem Einschalten wieder aufgerufen.

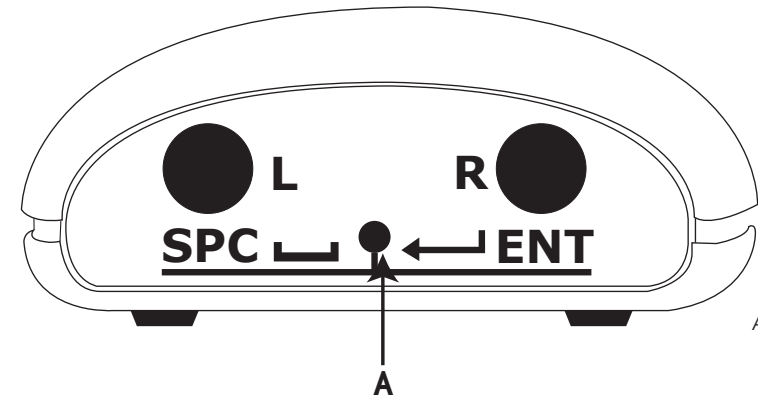


Abbildung 1

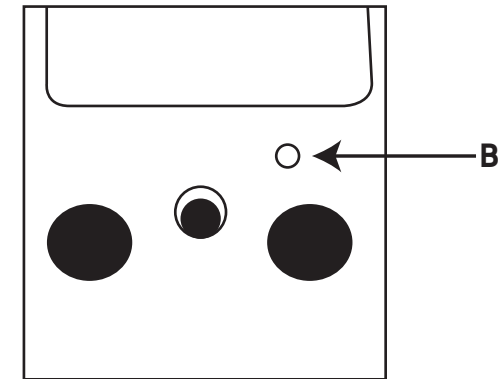


Abbildung 2

Wartung

Ihr Simple Switch Interface besitzt keine Teile, die gewartet werden müssen. Sollte eine Reparatur notwendig werden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.

Garantie

Die Garantie Ihres Simple Switch Interface erstreckt sich auf Fehler bei der Fertigung oder auf defekte Komponenten. Das Gerät ist entwickelt für den häuslichen und den schulischen Einsatz. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie. Unerlaubte Reparaturen oder Veränderungen am Gerät, mechanische Überlastung, Eintauchen in Flüssigkeiten oder Anschließen an inkompatible Geräte führt ebenso zum Erlöschen der Garantie.