


Gebrauchsanleitung

Simple Switch Schnittstelle

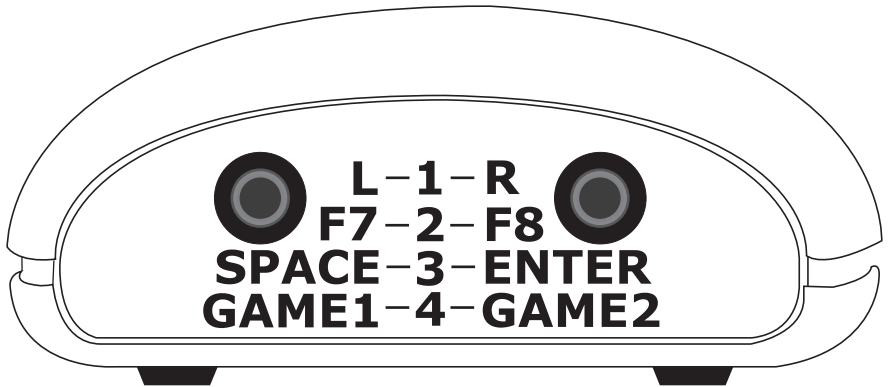

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den
Lieferumfang.

Simple Switch
Schnittstelle

Gebrauchsanleitung

Produktbeschreibung

Diese Simple Switch Schnittstelle ist eine praktische Möglichkeit, bis zu zwei Schalter an einen Computer anzuschließen, um unterstützende Software zu nutzen. Das Gerät kann als Linksklick / Rechtsklick, Leertaste / Entertaste, als F7/F8 (für Klick-Software*) oder als Gamepad1/2 (für Grid- Software*) eingestellt werden.

Eigenschaften

- USB – Verbindung
- Kein Treiber nötig
- PC und Mac kompatibel
- Einstellbar als Linksklick / Rechtsklick, Leertaste / Entertaste, als F7/F8 oder als Gamepad1/2
- Dauerhafte Speicherung der Einstellungen

Kompatibilität

Ihre **Simple Switch Schnittstelle** ist kompatibel mit allen PC und Mac Geräten, die über einen USB - Anschluss verfügen. Eine Verbindung per PS/2 Buchse, auch mit einem Adapter, ist aufgrund der Wirkungsweise der **Simple Switch Schnittstelle** nicht möglich.

Installation

Starten Sie Ihren Computer. Verbinden Sie die **Simple Switch Schnittstelle** mit dem USB-Anschluss. **Simple Switch Schnittstelle** wird nun automatisch erkannt und die nötigen Treiber installiert. Je nach Betriebssystem Ihres Computers, wird Ihnen der Abschluss der Installation angezeigt. Die **Simple Switch Schnittstelle** ist nun zur Nutzung bereit.

Einstellungen

Die folgende Tabelle zeigt die Belegung der Buchsen:

Buzzer	Linke Buchse	Rechte Buchse
1 Piepton	Linksklick	Rechtsklick
2 Pieptöne	F7	F8
3 Pieptöne	Leertaste	Enter
4 Pieptöne	Gamepad 1	Gamepad 2

Tabelle 1: Belegung der Buchsen

Um die Belegung zu ändern, drücken Sie bitte den Knopf an der Unterseite des Geräts. (A in Abbildung 1). Die Anzahl der Pieptöne, die der Buzzer ausgibt, zeigt Ihnen die neue Einstellung an, siehe Tabelle 1. Die neuen Einstellungen bleiben, auch bei unterbrochener Stromzufuhr, solange gespeichert, bis Sie diese ändern.

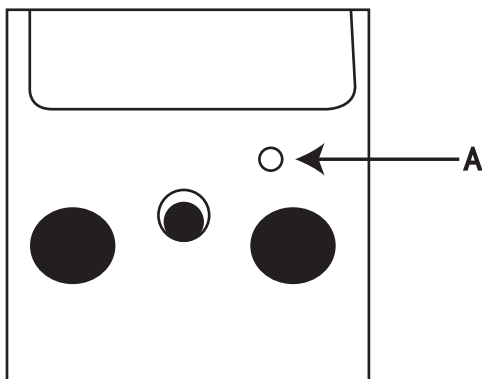
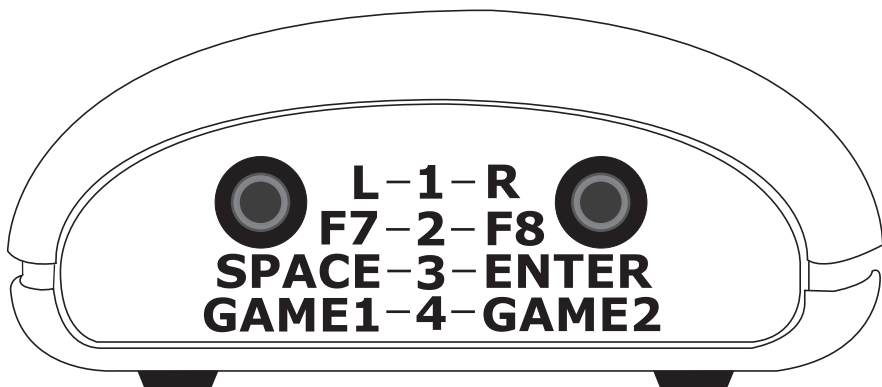


Abbildung 1

Wartung

Ihre Simple Switch Schnittstelle ist komplett wartungsfrei. Sollte eine Reparatur nötig sein, senden Sie Ihr Gerät zurück an Pretorian Technologies Ltd oder an einen autorisierten Fachhändler.

Gewährleistung

Die Gewährleistung Ihrer Simple Switch Schnittstelle erstreckt sich über Fertigungs- und Bauteilfehler. Das Gerät ist für eine Heim- und Schulanwendungen konzipiert. Benutzung in anderen Umgebungen unterliegt nicht der vorgesehenen Verwendung. Eigenmächtige Reparatur oder Veränderung, mechanische Beschädigung, Benutzung in feuchter Umgebung oder mit nicht kompatiblen Geräten lässt die Gewährleistung erlöschen.



Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB United Kingdom

Tel +44 (0) 1427 678990 **Fax** +44 (0) 1427 678992

SimplyWorks® is a registered trademark of Pretorian Technologies Ltd.

www.pretorianuk.com

S040172
Use with firmware
versions 88.3 onwards