

BJ-884-A BJOY Hand A

Betriebs- und Montageanleitung



 **BJADAPTACIONES**
tu apoyo, tu tecnología

1_ Einführung

Der Mausemulator BJOY Hand A ist eine Vorrichtung, welche sich wie eine konventionelle Maus verhält und speziell für die Kontrolle des Computers anhand einer leichten Bewegung der Finger ausgelegt worden ist, wodurch der Zugang sowohl zum Joystick, der das Verfahren des Cursor ermöglicht, als auch zu den normalen Funktionen der Mausclicks möglich ist.

Das Gerät hat folgende Haupteigenschaften:

- Ergonomisches Design, wodurch das Gerät leicht in den Händen gehalten werden kann.
- Feinfühliges Analog-Joystick, dessen Betätigung nur minimalen Kraftaufwand erfordert.
- 4 personalisierbare Tasten für die Klicks mit auditivem Feedback.
- Möglichkeit der freien Bewegung (in alle Richtungen).
- Progressives Bedienelement, welches die Anpassung der Cursorgeschwindigkeit an die auf den Joystick ausgeübte Aktion ermöglicht: stärkere Betätigung - größere Geschwindigkeit und umgekehrt. Die ermöglicht eine feiner Steuerung der Bewegung.
- Das Gerät kann auf Wunsch so personalisiert werden, dass externe Umschalter für die Klicks angeschlossen werden können.
- Ermöglicht die Anpassung an die Position des Benutzers, wobei die Bewegungsrichtungen je nach Montageausrichtung angepasst werden können
- Keine Installationssoftware erforderlich: Direkte Erkennung des Geräts durch das Betriebssystem
- Die Maus ist mit allen Plattformen mit USB-Eingang kompatibel (Windows, MacOS, Linux,...)
- Es können die normalen Konfigurationen der Betriebssysteme für die Maus durchgeführt werden (Änderung der Art des Mauszeigers, Klickoptionen usw.)
- Anhand der zusammen mit dem Produkt gelieferten Software *BJOY Konfigurator* konfigurierbar und personalisierbar.

- Die Konfiguration wird im Gerät und nicht im PC gespeichert, was die Verwendung mit anderen Computern ermöglicht, ohne dass die Konfiguration erneut durchgeführt werden muss.

2_Beschreibung und Montage des Geräts

2.1 Gerätebeschreibung

Die Maus BJOY Hand A besteht aus folgenden Teilen:

- Joystick
- Tasten für die Klicks
- USB-Anschluss

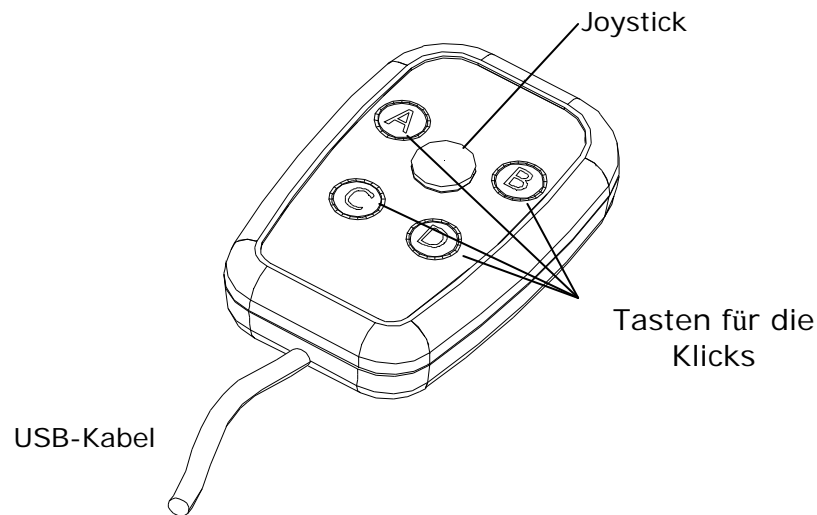


Abb. 1 Bestandteile des BJOY Hand A

Der Joystick ermöglicht das Verfahren des Cursors in alle Richtungen anhand einer flachen Bewegung. Die diagonalen Bewegungen können auf Wunsch anhand des Konfigurationsprogramms gesperrt werden.

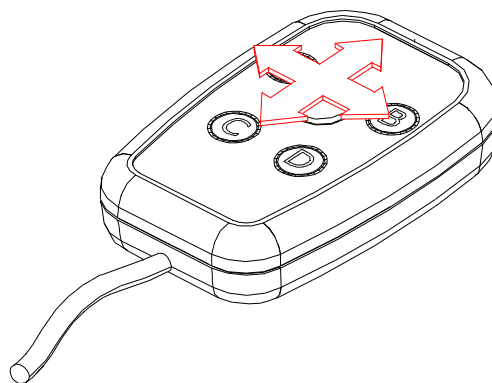


Abb. 2 Verfahren des Joysticks

Die vier Tasten des Geräts ermöglichen die Durchführung der Mausclickfunktionen: Klick links, Klick rechts, Doppelklick, Ziehen-Ablegen. Die Funktion jeder Taste kann anhand der Konfigurationssoftware BJOY zugewiesen werden.

Auf Wunsch kann dieses Gerät so personalisiert werden, dass externe Umschalter angeschlossen werden können. Die Umschalter-Eingänge entsprechen dann den auf dem Gerät und in der Konfigurationssoftware angegebenen Tasten A, B, C, D.

3_Verwendung der Maus BJOY Hand A

Für die Verwendung der Maus BJOY Hand A muss ein Anschlusskabel an den USB-Port des Computers angeschlossen werden. Nachdem der Computer das Gerät erkannt hat, kann die Maus verwendet werden.

Um den Cursor zu bewegen, den Joystick einfach in die gewünschte Richtung drücken. Beim Verfahren des Cursors ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein progressives Bedienelement handelt, d.h. die Geschwindigkeit des Cursors passt sich an die auf den Joystick ausgeübte Aktion an: Bei stärkerer Betätigung wird die Bewegung schneller und umgekehrt.

Zum Klicken werden die Tasten A, B, C und D auf dem Gerät verwendet. Diese Tasten haben folgende voreingestellte Funktionen:

- Eingang A:** Klick links
- Eingang B:** Klick rechts
- Eingang C:** Doppelklick
- Eingang D:** Ziehen - Ablegen

Die Funktion des Ziehens wird durch einmaliges Drücken des Tasters aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt bleibt der Cursor aktiv, so als ob die linke Maustaste gedrückt würde. Für das Ziehen an den gewünschten Platz wird der Joystick verwendet. Zum Deaktivieren dieser Funktion erneut den Taster für das Ziehen drücken.

Es ist zu beachten, dass sowohl die Betätigung der Taster als auch die Bewegungen des Cursors anhand der im Folgenden beschriebenen Konfigurationssoftware eingestellt werden können.



4_Konfigurationsprogramm BJOY

Das Konfigurationsprogramm BJOY ermöglicht es, das Verhalten der Maus zu verändern und es an die Erfordernisse des Anwenders anzupassen.

Das Konfigurationsprogramm BJOY kann hier heruntergeladen werden:

<http://update.bj-adaptaciones.com/BJOY/BJOYSetup.exe>


Für die Installation des Programms führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- 1° Speichern Sie die Datei BJOYSetup.exe in Ihrem Computer.
- 2° Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf das Icon der ausführbaren Datei (BJOYSetup.exe).
- 3° Wählen Sie die Sprache, die während der Installation verwendet werden soll.
- 4° Nach Beginn der Installation führt das Programm Sie durch den Installationsprozess. Während der Installation sollten alle übrigen Programme geschlossen werden. Drücken Sie auf "Weiter", um mit der Installation fortzufahren.
- 5° Sie können das Verzeichnis für die Installation des Programms und den Ort des Direktzugriffs zum Programm im Startmenü ändern. Außerdem können Sie einen Direktzugriff zu der Anwendung auf Ihrem Desktop anlegen.
- 6° Nach Auswahl der Installationsoptionen drücken Sie auf "Installieren", um das Programm auf Ihrem Computer zu installieren.
- 7° Wenn Sie die Installation nicht zu Ende führen möchten, drücken Sie auf "Abbrechen". Um während der Installation zum vorherigen Schritt zurückzugehen, drücken Sie auf "Zurück".

WICHTIGER HINWEIS: Um auf die verschiedenen Konfigurationsoptionen zugreifen zu können, muss ein BJOY Gerät an den Computer angeschlossen sein.

Sollte kein BJOY Gerät angeschlossen sein, erscheint der folgende Bildschirm:



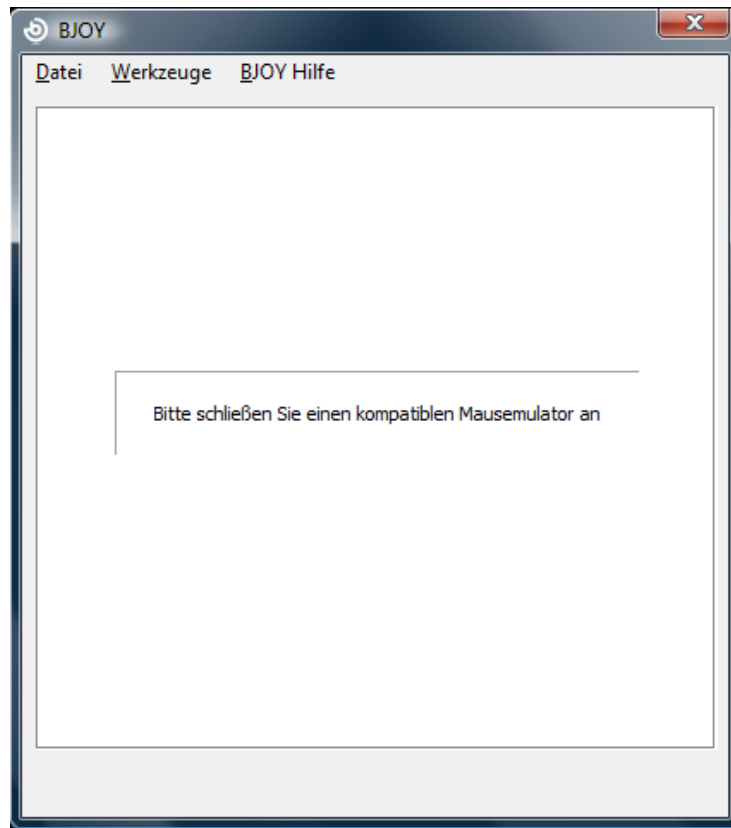

WICHTIGER HINWEIS: Immer, wenn die Änderungen in der Konfiguration auf das BJOY Gerät angewendet werden sollen, muss das Feld "Anwenden" rechts unten im Programmfenster gewählt werden.

5_Wartung des Geräts

Für Wartung und Reinigung des Geräts beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Das Gerät ausschließlich an USB-Ports anschließen.
- Zum Hereinstecken und Herausziehen des Kabels dieses immer direkt am Stecker anfassen. **Nicht am Kabel ziehen.**
- Der Kabelausgang darf nicht geknickt sein.
- Zur Reinigung des Geräts dieses mit einem feuchten Lappen säubern. Keine abrasiven Produkte verwenden. Die Reinigung muss bei abgeschaltetem Gerät erfolgen.



- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gehäuseinnere des Joysticks dringen, da dies das Gerät ernsthaft beschädigen könnte.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien ausgelegt.
- Das Gerät bei Störungen nicht eigenmächtig versuchen zu reparieren.

6_Eigenschaften

- USB 2.0 Anschluss
- Betriebsspannung: 5V
- Betriebsstromstärke: 50mA
- Abmessungen: 50 x 75 x 17 mm
- Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG. Die Konformitätserklärung kann auf der in dieser Anleitung angegebenen Website eingesehen werden.

7_Entsorgung des Produkts

- Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts darf weder dies noch sein elektronisches Zubehör (z.B. das USB-Kabel) zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden, die durch eine unkontrollierte Entsorgung von Müll entstehen können, sind diese Produkte von anderen Abfallarten zu trennen und korrekt zu recyceln. So wird die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen gewährleistet.
- Private Verwender können sich an ihren Verkäufer oder die zuständigen örtlichen Behörden wenden und sich darüber informieren, wohin sie das Gerät bringen können, damit es auf umweltfreundliche und sichere Art und Weise recycelt werden kann.





BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

c. Mare de Déu del Coll, 70, bajos
08023 Barcelona | Spain
t. +34 93 285 04 37 | fax +34 93 553 56 34
info@bj-adaptaciones.com

www.bj-adaptaciones.com