


GEBRAUCHSANLEITUNG

OPTIMA Joystick mit Gaming Features

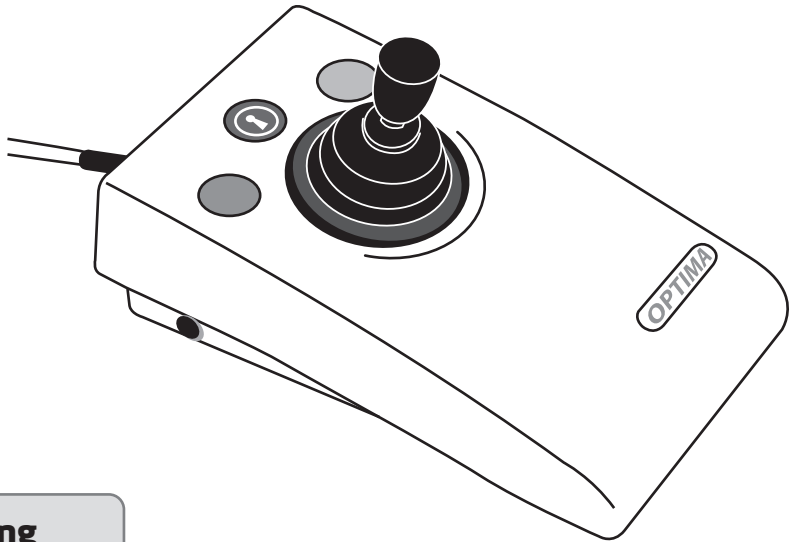

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den
Lieferumfang:

OPTIMA Joystick
T-Bar und Softballgriff
Gebrauchsanleitung

Produktbeschreibung

Die kompakte Ausführung des Joystick bedarf keiner Feinmotorik und ist deshalb für viele Computernutzer geeignet.

Der OPTIMA Joystick wurde speziell dafür design t , um auf die leichteste Berührung (0.5 Newton) zu reagieren, und eine genaue Cursornavigation sowie ein präzises Anpeilen von Objekten auf dem Computerbildschirm, zu ermöglichen.

Produktmerkmale

- Plug und Play USB und PS/2 Funktion benötigen keine Treiber.
- Mit PC, Mac und Chromebook kompatibel.
- Zuschaltbare Gaming-Einstellung zur Nutzung der Xbox Adaptive Controller.
- Leichtgängige Joystickbewegung.
- Einstellbare Cursorgeschwindigkeit.
- Drag lock und Doppelklick wählbar.
- Buchsen für externe Schalter zum Rechts- und Linksklick.
- Robuste Konstruktion und ergonomisches Design.
- Standardisierte Befestigungsmöglichkeit.
- Optionale Linkshändernutzung.

Kompatibilität

Ihr **OPTIMA Joystick** funktioniert mit USB und PS/2 kompatiblen Computer, einschließlich PCs, Macs und Chromebooks.

Installation

Schalten Sie Ihren Computer vollständig aus. Wählen Sie einen freien USB- oder PS/2-Anschluss. Schließen Sie ihren **OPTIMA Joystick** an. Um eine PS/2-Buchse nutzen zu können, verwenden Sie bitte einen PS/2-Adapter. Dieser ist nicht mehr im Lieferumfang enthalten, da sich USB als dauerhaftes Verbindungsformat durchgesetzt hat. Bei Bedarf wird Ihnen der PS/2 Adapter kostenlos zur Verfügung gestellt, wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Fachhändler.

Nun können Sie Ihren Computer wieder einschalten. Ihr **OPTIMA Joystick** ist nach dem Neustart betriebsbereit. Es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt.

Lernmodus

Eine Reihe von Einstellungen erlauben Ihnen, Ihren **OPTIMA Joystick** an genau Ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese werden alle im Lernmodus eingestellt und im Gerät gespeichert, auch wenn dieses abgeschaltet wird oder sogar den Computer wechseln.

Um diese Einstellungen zu ändern, stellen Sie den Lernmodus wie folgt ein: Halten Sie den mittleren Knopf gedrückt, bis Sie einen Kontrollton hören. Jetzt befindet sich das Gerät im Lernmodus und akzeptiert folgende Änderungen:

Cursor - Geschwindigkeit

Um die Geschwindigkeit im Lernmodus einzustellen, drücken Sie bitte kurz den mittleren Knopf. Jedes Mal, wenn dieser gedrückt wird bestätigt dies ein Piepton. Hierbei stehen 1 Piepton für die langsamste und 4 Pieptöne für die schnellste Einstellung. Die Geschwindigkeit des Cursors wird sofort angepasst, damit Sie gleich ausprobieren können, welche die passende Einstellung für Sie ist.

Linkshändernutzung

Der linke und der rechte Knopf können getauscht werden, was besonders für Linkshänder praktisch ist. Um dies einzustellen, drücken Sie den linken Knopf im Lernmodus. Der folgende Piepton bestätigt, dass das Gerät im „Standardmodus“ ist. Zwei Pieptöne zeigen den Linkshändermodus an.

Doppelklick

Der rechte Knopf kann auch mit einem Doppelklick belegt werden, für alle Nutzer, die Schwierigkeiten beim Doppelklicken haben. Um dies einzustellen, drücken Sie kurz den rechten Knopf im Lernmodus. Ein Piepton bestätigt die Einstellung im Standard Rechtsklickmodus. Zwei Pieptöne zeigen den Doppelklickmodus an.

Buzzer An/Aus


Der **OPTIMA Joystick** ist mit einem Buzzer ausgestattet, der eine hörbare Bestätigung von Funktionen (Drag lock, Doppelklick, Lernmodus usw.) abgibt. Wenn der **OPTIMA Joystick** in einem Klassenraum genutzt wird, wo viele Nutzer arbeiten, bietet sich ein Abschalten des Buzzers an. Um dies zu tun, halten Sie den rechten Knopf im Lernmodus gedrückt bis Sie zwei lange Pieptöne hören. Jetzt ist der Buzzer abgeschaltet – auch wenn er im Lernmodus noch funktioniert. Wenn Sie die Prozedur erneut durchführen, schaltet der Buzzer wieder ein.

Alle der oben genannten Einstellungen können Sie so oft Sie mögen, im Lernmodus vornehmen. Dadurch können Sie probieren ob die Einstellungen genau Ihrem persönlichen Bedarf entsprechen. Haben Sie Ihre idealen Einstellungen gefunden, so werden diese im Gerät gespeichert, indem Sie den mittleren Knopf gedrückt halten bis Sie einen Kontrollton hören. Nun funktioniert Ihr Gerät wie gewünscht.

Bitte beachten Sie: Wenn sowohl Linkshändernutzung als auch Doppelklick gewählt wurden, dann ist die Tastenbelegung wie folgt: Doppelklick, Drag und Linksklick – von links nach rechts.

Bitte beachten Sie auch: Die Funktion der Buchsen für externe Schalter führt die Funktionen der internen Schalter aus, je nachdem wie diese eingestellt wurden.

Der Lernmodus wird automatisch verlassen, und die Einstellungen gehen verloren, wenn diese mehr als eine Minute lang nicht geändert werden.

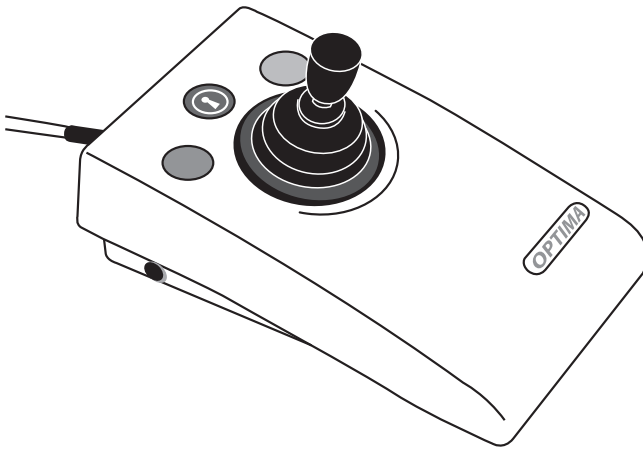

Pretorian
TECHNOLOGIES

Designed for



XBOX ADAPTIVE CONTROLLER

Wechseln zwischen Maus- und Gamemodus

Ihr **Optima Joystick** wird im Mausmodus geliefert, demnach funktioniert er wie eine Maus, wenn Sie ihn auspacken. Sollten Sie ihn im Gamemodus benutzen wollen, schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an und halten Sie den roten und den gelben Knopf ca. 12 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Jetzt befindet sich der Joystick im Gamemodus und behält diesen auch bei einem Computerwechsel bei.

Um ihn wieder in den Mausmodus zu überführen, halten Sie den roten und gelben Knopf wieder ca. 12 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Auch dieser Modus wird nun beibehalten, sogar beim Computerwechsel.

Wartung

Ihr **OPTIMA Joystick** ist wartungsfrei. Sollten trotzdem Störungen eintreten, wenden Sie sich bitte an Pretorian Technologies Ltd oder Ihren Fachhändler.

Gewährleistung

Die Gewährleistung Ihres **OPTIMA Joystick** erstreckt sich über 24 Monate auf Fehler bei der Fertigung oder auf defekte Komponenten. Das Gerät wurde für den häuslichen, schulischen und gewerblichen Einsatz entwickelt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie.

Pretorian
TECHNOLOGIES LTD.

Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB United Kingdom

Tel +44 (0) 1427 678990 **Fax** +44 (0) 1427 678992

S040069 Rev 1.

Use with firmware versions 75.2 onwards.

www.pretorianuk.com