



## Fingerführung Kurzanleitung


Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Fingerführung korrekt zu befestigen.

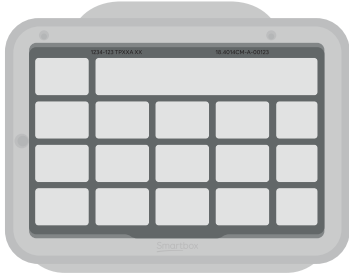

Platzieren Sie die Fingerführung auf der Vorderseite des Geräts.

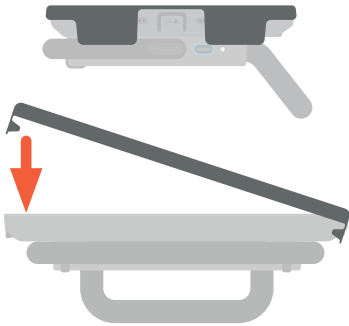

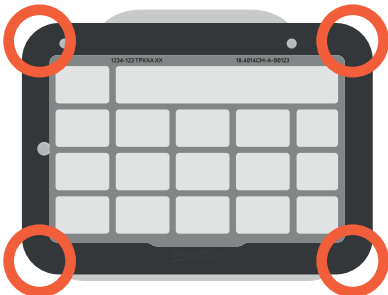

Legen Sie die rechte Seite des Rahmens mit den beiden Clips über die rechte Seite Ihres Geräts und drücken Sie die linke Seite nach unten, um den Rahmen zu befestigen. Möglicherweise müssen Sie den linken Clip nach außen ziehen, damit er richtig sitzt.



Drücken Sie alle vier Ecken fest an, um sicherzustellen, dass die Fingerführung gut gesichert ist.

# Erklärung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Europäisches Symbol zur Erklärung der Konformität mit der EU-Gesetzgebung
	Lesen Sie das Handbuch
	Symbol für die Erklärung der Konformität im Vereinigten Königreich
	Eindeutige Kennung des Produktes (UDI)
	Medizinprodukt
	EU-Bevollmächtigter
	Schweizerischer Bevollmächtigter
	Modellnummer
	Seriennummer
	Min / Max Lager- und Transporttemperatur
	Mix / Max Lager- und Transportfeuchtigkeit

## Hygienische Reinigung

- Reinigen Sie alle Flächen mit einem feuchten Tuch
- Lassen Sie das Gerät trocknen.
- Hartnäckige Verschmutzungen und Rückstände können Sie z.B. mit einer Zahnbürste entfernen.

Verwenden Sie kein Reinigungsspray, -gel oder -politur.

Diese Fingerführung wird von Smartbox Assistive Technology Ltd. hergestellt.

**UK:** Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre Sandys Road Malvern WR14 1JJ.

**EU:** REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8c, 28217 Bremen, Germany

**CH:** Best Care Consulting, Kehlhofrain 12a, CH - 6043 Adligenswil

Modellnummern: 10090 140 / 10090-141 / 10090-142

Kompatibel mit:

10090-140	10090-141	10090-142
TP08E	TP10E	TP10H
TS08E	TS10E	TS10H
TP08E - Halterung	TP10E - Halterung	TP10H- Halterung

Support erhalten Sie unter [hub.thinksmartbox.com](https://hub.thinksmartbox.com)