



Kurzanleitung: Big Beamer™ und Jelly Beamer™ Funksender

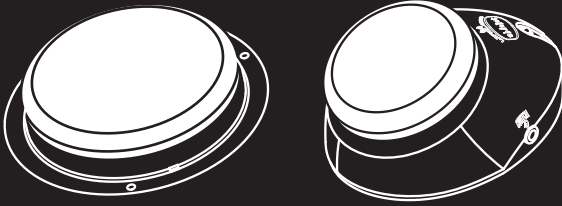

ablenet®

www.ablenetinc.com

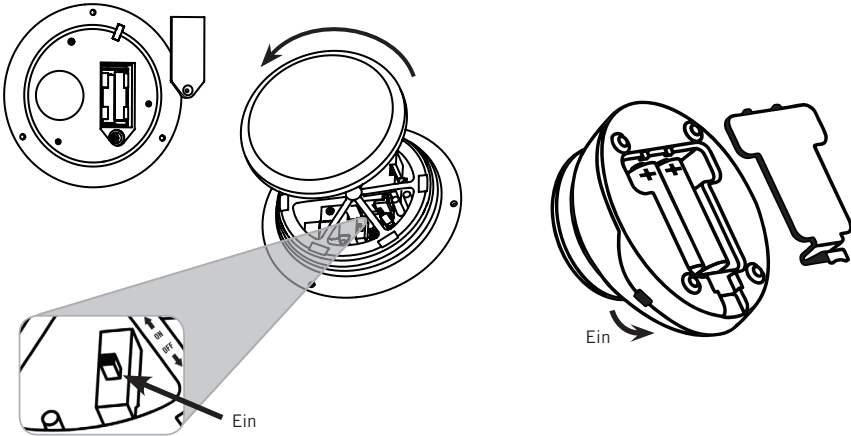

- 1. Legen Sie in den Sender Komponenten zwei Batterien ein. Beziehen Sie sich dabei auf die Abbildung auf dem Gehäuse.**

Für den Big Beamer Sender sind AAA-Batterien erforderlich. Für den Jelly Beamer sind AA-Batterien erforderlich.

Bei schwachen Batterien blinkt die Gerätelampe drei (3) Mal.

- 2. Schieben Sie den Netzschalter* auf „On“ (Ein).**

Daraufhin leuchtet(n) die Lampe(n) des Senders auf.

*Der Netzschalter des Big Beamer befindet sich unter der Sensor-Oberfläche

- 3. Verbinden Sie den Sender mit linkable™ Empfängern oder anderen verbindbaren Produkten.**

Anweisungen zum Verbinden sind den entsprechenden Produkthandbüchern zu entnehmen.

Weitere Informationen

Montageoptionen finden Sie auf www.ablenetinc.com. Big Beamer und Jelly Beamer Sender haben eine effektive Reichweite von bis zu 9 m. Zum Reinigen die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie sowie Informationen zur Rücksendung/Reparatur können auf www.ablenetinc.com eingesehen werden. Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc. Minneapolis/St. Paul, MN | 800-322-0956 | www.ablenetinc.com