

Zweckbestimmung, Eigenschaften und Funktionen

Das ***Clevy Keyboard Simply Works*** ist eine Variante der bekannten ***Clevy***-Tastatur. Sie wird nicht über direkt über den USB-Anschluss am Computer angeschlossen, sondern überträgt die Tastenbedienungen zunächst über Funk an den ***SimplyWorks-RECEIVE***-Funk-Empfänger, der seinerseits über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Dadurch ist der Benutzer vor dem Computer in seinem Bewegungsspielraum erheblich großzügiger.

Die ***Clevy***-Tastatur wurde für Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren entwickelt. Sie hat fröhliche Farben und ein klares, Kinder ansprechendes Design. Dank der sehr deutlichen Buchstaben ist die ***Clevy***-Tastatur eine gute Ergänzung zum Schreibunterricht. Sie ist solide und robust konstruiert.



Lieferumfang Art.-Nr.: 22265

- ***Clevy Keyboard Simply Works***
- 2 „Mignon“-Batterien (Typ „AA“)
- diese Kurzanleitung

Lieferumfang Art.-Nr.: 22267

- Bundle, bestehend aus Art.-Nr. 22265 wie oben
- und ***SimplyWorks-RECEIVE***-Funk-Empfänger



Zubehör und Ersatzteile

- alle oben genannten Teile
- Fingerführung Art-Nr.: R01245
- Tastaturschutzfolie Art-Nr.: R01251
- ***CONTROL LITE*** Art-Nr.: R01269
- ***CONTROL*** Art-Nr.: R01270
- ***CONTROL PRO*** Art-Nr.: R01271

Installation und Beschreibung

Einbau der Batterie

Entfernen Sie zunächst auf der Tastaturunterseite den länglichen Batteriefachdeckel. Legen Sie dann die beiden beiliegenden „Mignon“-Batterien (Typ „AA“ oder äquivalent) lagerichtig jeweils mit dem Pluspol nach rechts in das Fach ein und schließen Sie wieder den Deckel. Der Hersteller empfiehlt qualitativ hochwertige Batterien wie von „Duracell“ oder „Energiser“ zu verwenden. Sollten Sie die Tastatur für eine längere Zeit nicht gebrauchen, empfiehlt es sich die Batterie aus dem Gerät zu nehmen, um ein Auslaufen und damit Schäden am Gerät zu verhindern.

Einem Empfänger zuordnen

Vor der Benutzung des **Clevy Keyboard Simply Works** muss die Tastatur einem der SimplyWorks-Empfänger (RECEIVE, CONTROL LITE, CONTROL, CONTROL PRO) zugeordnet werden. Folgen Sie diesen Punkten:

1. Positionieren Sie den Empfänger nicht weiter als 1 Meter von der Tastatur.
2. Drücken Sie den PAIR-Taster des Empfängers kurz. Die PAIR-LED des Empfängers beginnt langsam zu blinken.
3. Innerhalb von 10 Sekunden drücken Sie den PAIR-Taster der Tastatur, dieser ist der versenkt angeordnete Taster unterhalb des Batteriefaches auf der Tastaturunterseite. Benutzen Sie dazu entweder eine Kugelschreibermine oder eine aufgebogene Büroklammer. Durch leichtes Drücken in das markierte Loch „●)“)“ spüren Sie das Auslösen des versenkt angeordneten Tasters.
4. Nach kurzer Zeit wird die PAIR-LED des Empfängers für 5 Sekunden konstant leuchten um anzuzeigen, dass die Zuordnung erfolgreich war.
5. Sollte die PAIR-LED aufhören zu blinken und dann nicht konstant leuchten, wiederholen Sie bitte das Zuordnen ab Absatz 2. Sollte dies wiederum nicht erfolgreich sein, lesen Sie bitte im Kapitel Fehlersuche.

Einstellungen des Schiebeschalters

Wählen Sie mittels des Schiebeschalters auf der Tastaturunterseite links die von Ihnen gewünschte Tastenfunktion aus:

Position des Schiebeschalters	Beschriftung am Gerät	Tastenwiederholung	Erklärung
Oben	Key Repeat	ein	Nach der im Betriebssystem eingestellten Tastenwiederholrate wird durch Drücken und dann Verweilen auf einer Taste wiederkehrend dasselbe Zeichen immer wieder zum Computer übertragen
Unten	Function Keys Tool	aus	Durch Drücken, beliebig langem Verweilen und Loslassen einer Taste wird dieses Zeichen nur einmal zum Computer gesendet.

Gebrauchsanweisung *Clevy Keyboard Simply Works*

Tastenwiederholrate einstellen

Sie können bei Bedarf die Tastenwiederholrate ändern.

WINDOWS-Benutzer machen dies im so oder ähnlich – abhängig von der WINDOWS-Version – genannten Fenster „Eingabehilfen – Einstellungen für die Anschlagverzögerung – Erweiterte Einstellungen für die Anschlagverzögerung – Wiederholgeschwindigkeit – Wiederholrate“ unter „Einstellungen – Systemsteuerung“.

Mac-Benutzer finden die Einstellungen unter „Systemeinstellungen – Tastatur- und Mauseinstellungen“.

Wartung

Ihr **Clevy Keyboard Simply Works** besitzt keine Teile, die gewartet werden müssen. Sollte eine Reparatur notwendig werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Fehlersuche

Sollte Ihr **Clevy Keyboard Simply Works** nicht korrekt funktionieren, versuchen Sie bitte anhand der folgenden Hinweise die Ursache zu ermitteln. Sollte trotz dieser Hilfen Ihr Gerät immer noch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte vor dem Zurücksenden mit Ihrem Händler in Verbindung.

Symptom	Mögliche Ursache	Hilfestellung
Gerät funktioniert nicht	Geräte sind nicht zugeordnet	Ordnen Sie sie lt. Kapitel Zuordnen neu zu
	Batterien sind in der CLEVY-Tastatur verbraucht	Batterien ersetzen
	Überprüfen Sie die USB-Verbindung zum Computer	
Gerät arbeitet fehlerhaft	Batterien sind ggf. im Empfänger oder in der CLEVY-Tastatur verbraucht	Batterien ersetzen
	Überprüfen Sie die USB-Verbindung zum Computer	
	Tastatur außerhalb des Übertragungsbereiches	Bewegen Sie den Empfänger näher zur CLEVY-Tastatur
	Funkstörungen	Entfernen Sie den Empfänger wie auch die CLEVY-Tastatur von Störquellen
Geräte lassen sich nicht zuordnen – LED erlischt nach 30 Sekunden	Batterien sind ggf. im Empfänger oder in der CLEVY-Tastatur verbraucht	Batterien ersetzen
	Stellen Sie sicher, dass die CLEVY-Tastatur beim Zuordnen nicht weiter als ca. 1 Meter vom Empfänger entfernt ist	

Gebrauchsanweisung *Clevy Keyboard Simply Works*

Produktdaten

Merkmale

Konstruktion	geschlossenes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
Abmessungen Breite * Höhe * Dicke	476 mm (B) * 182 mm (H) * 40 mm (D)
Gewicht	ca. 1250 g



Hinweis: Die **Clevy Keyboard Simply Works** gibt es nur in der Version mit Grossbuchstabenlayout.

Garantiezeit

2 Jahre.

Hilfsmittelverzeichnis

HMV-Nr.: 16.99.05.0900



Die Hilfsmittelnummer gibt nicht in jedem Fall eine im Hilfsmittelverzeichnis gelistete Nummer an. Wenn Sie sich ausführlicher zu diesem Thema informieren wollen, informieren Sie sich bitte bei den Informationen zum Produkt unter www.rehavista.de.

Einsatzgebiete

Typische Indikation: ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, Verletzungsfolgen, spastische und schlaffe Lähmungen, neurologische bzw. psychologische Störungen

Support

Sie erreichen uns montags bis freitags von 8:30-12:30 Uhr telefonisch unter 01804-321012 (0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und per E-Mail unter support@rehavista.de.

Außerdem können Sie sich an Ihren regionalen **REHAVISTA**-Partner wenden – s.a. www.rehavista.de.

Hersteller



BNC Distribution • Wasaweg 3a • 9723 JD Groningen • The Netherlands
T +31 (0)50 850 6960 • F +31 (050) 850 6969
www.bnc-distribution.com • www.clevy.com

SimplyWorks® ist ein eingetragenes Warenzeichen von:

Pretorian Technologies Ltd • Unit 37 Corringham Road Industrial Estate • Gainsborough
Lincolnshire DN21 1QB UK • Tel +44 (0) 1427 678990 • Fax +44 (0) 1427 678992
www.pretorianuk.com

© für die deutsche Übersetzung:

REHAVISTA GmbH • Konsul-Smidt-Str. 8C • 3. OG. • 28217 Bremen