

Version 1.1/2024-07

Gebrauchsanweisung

Talk Pad

Standard und Mini





Im Rahmen des anzuwendenden Konformitätsbewertungsverfahrens wurde von uns als Hersteller nachgewiesen, dass die geltenden Anforderungen nach den EU-Rechtsvorschriften erfüllt sind, daher liegt eine EU-Konformitätserklärung gemäß der „VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte“ (MDR) Art. 19 vor und die Produkte sind mit der CE-Konformitätskennzeichnung gemäß Art. 20 (MDR) versehen.

Gebrauchsanweisung Talk Pad (Standard und Mini)

Version 1.1/2024-07

© Copyright 2024 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanweisung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der REHAVISTA GmbH. Jegliche Vervielfältigung, ob vollständig oder auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die REHAVISTA GmbH.

Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf der REHAVISTA-Website unter www.rehavista.de

Inhalt

| | |
|---|----|
| 1. Vorwort | 4 |
| 2. Zweckbestimmung | 4 |
| 3. Symbolerklärung | 5 |
| 4. Sicherheitshinweise | 6 |
| Handhabung | 6 |
| Stromversorgung und Batterie/Akku | 7 |
| Montage | 8 |
| Einweisung | 8 |
| Reparatur | 9 |
| Interferenzen mit medizinischen Geräten | 9 |
| Körperliche Beschwerden | 10 |
| 5. Allgemeine Hinweise | 10 |
| Transportieren des Geräts | 11 |
| Reinigung und Desinfektion | 11 |
| Wartung | 12 |
| Wiedereinsatz | 13 |
| Softwareupdates/Backups | 13 |
| 6. Anwendung des Gerätes | 14 |
| Ein- und Ausschalten des Gerätes | 14 |
| Lautsprecher ein- und ausschalten | 16 |
| Akkuladestand überprüfen | 16 |
| Gerät und Lautsprecher laden | 16 |
| Neustart erzwingen (Reset) | 17 |
| Zum Home-Bildschirm wechseln | 17 |
| Zwischen Apps wechseln und Apps beenden | 18 |
| Kontrollzentrum | 19 |
| Das Dock | 19 |
| Geführter Zugriff | 20 |
| Kamera- und Foto-App | 21 |
| WLAN einrichten | 22 |
| Tasternutzung | 22 |
| 7. Anwendung der Kommunikationssoftware (App) | 22 |
| 8. Tragegurt befestigen | 23 |
| 9. Support | 23 |

1. Vorwort

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine dynamische Kommunikationshilfe von REHAVISTA entschieden haben. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie beim Betrieb des Gerätes die entsprechenden Anweisungen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zudem für künftiges Nachschlagen möglichst in der Nähe des Gerätes auf.

2. Zweckbestimmung



Die verschiedenen Ausführungen der Talk Pads sind Sprachausgabegeräte, die für Menschen mit Behinderung konzipiert wurden, deren Einschränkungen in Körperfunktionen und/oder -strukturen dazu führen, dass ihr Sprechen bzw. ihre Sprache eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.

Talk Pads bieten den Anwender:innen durch den Einsatz unterschiedlicher Kommunikationssoftware eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmte Kommunikationsmöglichkeit. Der Gebrauch eines Talk Pads unterstützt sprech- und/oder schreibunfähige Menschen, selbständig zu kommunizieren. Das Gerät wird in Ergänzung zur nonverbalen Kommunikation, durch z. B. Gesten und Mimik, eingesetzt und ermöglicht so eine Verständigung mit dem Umfeld.


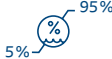



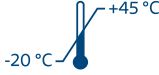






Talk Pads wurden nicht entwickelt, um Krankheiten oder andere medizinische Probleme zu diagnostizieren oder diese zu heilen oder zu behandeln. Die Talk Pads sind nicht lebenserhaltend oder lebensunterstützend. Im Falle eines Ausfalls des Gerätes und/oder der verwendeten Kommunikationssoftware können die Anwender:innen es nicht zur Kommunikation nutzen.

3. Symbolerklärung

Innerhalb dieser Gebrauchsanweisung sind folgende Symbole zu finden:

| | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Sicherheitshinweise beachten |  | Hinweise zur Anwendung beachten |
|---|------------------------------|---|---------------------------------|

Folgende Symbole sind auf dem Talk Pad oder auf der Verpackung zu finden:

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Medizinprodukt |  | relative Luftfeuchtigkeit |
|  | Konformität der Europäischen Verordnung |  | Betriebstemperaturbereich (auf dem Talk Pad) |
|  | Gebrauchsanweisung beachten |  | Lagertemperaturbereich (auf der Außenverpackung) |
|  | Hersteller |  | Zeigt den Bevollmächtigten in der Schweiz an |
|  | Seriennummer |  | Nicht im Hausmüll entsorgen |
|  | Artikelnummer | | |
|  | Die Schutzart durch ein Gehäuse wird anhand genormter Prüfverfahren nachgewiesen und mit dem IP-Code (International Protection) angegeben. | | |

4. Sicherheitshinweise

Handhabung



Behandeln Sie das Talk Pad mit der notwendigen Sorgfalt. Das Gerät besteht aus Glas, Metall und Kunststoff und in seinem Inneren befinden sich empfindliche elektronische Bauteile. Veränderungen daran dürfen nicht vorgenommen werden.



In extremen Fällen kann die Frontscheibe des Geräts beschädigt werden, was zu scharfen Kanten führen kann. Unter diesen Umständen sollte das Gerät nicht verwendet werden.



Die Talk Pads sind nicht lebenserhaltend oder lebensunterstützend. Im Falle eines Ausfalls des Gerätes und/oder der verwendeten Kommunikationssoftware können die Anwender:innen es nicht zur Kommunikation nutzen.



Die Geräte bestehen aus mehreren Einzelteilen, die zu einem Ganzen verbaut wurden. In Kinderhänden können bestimmte Einzelteile vom Gerät getrennt werden, wodurch möglicherweise Erstickungsgefahr oder eine andere Gefahr für das Kind besteht. Kleine Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung sollten das Talk Pad ohne Aufsicht durch Erziehungsberechtigte bzw. Assistenz weder erreichen noch benutzen dürfen.



Ihr Gerät wird mit einem Tragegurt geliefert. Wenn die Gefahr besteht, dass Benutzer:innen sich mit dem Gurt strangulieren könnten, verwenden Sie den Gurt nicht. Ihr Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert und kann mit kabelgebundenem Zubehör verwendet werden. Diese können eine Strangulationsgefahr darstellen.



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten, nassen, sehr kalten oder sehr heißen Umgebungen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen, insbesondere nicht in die Anschlüsse oder Lüftungsöffnungen.



Die Verwendung von Kopfhörern und Lautsprechern mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Achten Sie darauf, dass die Lautstärke Ihres Gerät immer auf ein unbedenkliches Niveau eingestellt ist.

Stromversorgung und Batterie/Akku



Ihr Talk Pad enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Alle wiederaufladbaren Akkus werden mit der Zeit schwächer. Die Nutzungsdauer Ihres Talk Pads kann nach einer vollständigen Aufladung mit der Zeit kürzer werden. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte Ihr Gerät nicht bei extremen Temperaturen von unter 0 °C oder über 45 °C geladen werden. Bei diesen Temperaturen wird Ihr Akku nur langsam oder gar nicht geladen. Setzen Sie Ihr Gerät keinem Feuer oder Temperaturen über 90 °C aus, da dies zu Fehlfunktionen, Entzündungen oder Explosionen des Akkus führen kann.

Laden Sie Ihr Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel auf. Die Verwendung nicht zugelassener Netzteile kann Ihr Gerät schwer beschädigen und einen Brand verursachen. Wenn das Netzkabel Ihres Geräts verloren geht oder beschädigt ist, wenden Sie sich an REHAVISTA.

Wenn der Akku Ihres Talk Pads leer ist und das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um eine Beschädigung des Akkus und der Hardware zu vermeiden. Das Betriebssystem versucht, dies so sicher wie möglich zu tun, es wird jedoch empfohlen, das Netzkabel anzuschließen, bevor das Gerät ausgeschaltet wird.

Versuchen Sie niemals, die Akkus im Talk Pad selbst auszutauschen, da diese hierdurch beschädigt werden können, was wiederum zu einer Überhitzung und zu Verletzungen führen kann. Die integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie im Talk Pad darf nur von REHAVISTA oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden.

Montage



Befestigungen sind gemäß den Vorgaben der Hersteller der Komponenten zu montieren. Die Benutzer:innen tragen bei der Montage das alleinige Risiko und haften für Personen- oder Sachschäden, die durch Herabfallen eines Geräts, das sich aus einer Anbringungs Vorrichtung gelöst hat, verursacht wurden.

Einweisung



Nach § 4 Abs. 3 MPBetreibV ist eine Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung von Medizinprodukten erforderlich. Das Bundesministerium für Gesundheit bezieht dazu Stellung und die zuständige Behörde teilt diese Empfehlungen des Ministeriums.

Allgemeine Anforderungen (§ 4)

„Welche Vorgaben sind bei der Einweisung zu beachten?“ Es wird [...] empfohlen, sich hier nach den Regelungen des § 10 für Medizinprodukte der Anlage 1 zu richten. Das heißt, dass die einweisende Person vom Hersteller oder einer Person, die im Einvernehmen mit dem Hersteller handelt, eingewiesen wurde, bevor sie die Einweisung anderer Anwenderinnen und Anwender übernimmt. Entscheidend ist, dass eine entsprechend kompetente Person in geeigneter Weise in die sachgerechte Handhabung einweist.

„Kann die Einweisung bei Medizinprodukten in der häuslichen Umgebung entfallen?“ Nein. Auch für Medizinprodukte, die den PatientInnen für die Anwendung im häuslichen Bereich zur Verfügung gestellt werden, ist der Betreiber verpflichtet, in die ordnungsgemäße Anwendung einzuweisen. Die Krankenkasse kann ihrer Pflicht nachkommen, indem sie den Leistungserbringer vertraglich verpflichtet, denjenigen einzuweisen, dem er das Medizinprodukt aushändigt, i.d.R. also den Patienten/die Patientin oder/und die jeweiligen Angehörigen. Ist zum Zeitpunkt der Produktübergabe schon bekannt, dass auch professionel-

les Pflegepersonal zum Einsatz kommt, sollte der Einweisungstermin so gewählt werden, dass alle relevanten Personen anwesend sind. Der Leistungserbringer sollte die Einweisung dokumentieren.

[Quellen: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/faq-mpbetreibv.html#c12830>]

Reparatur



Versuchen Sie in keinem Fall, das Talk Pad zu öffnen und selbst zu reparieren. Die Demontage des Talk Pads kann zu dauerhaften Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich an REHAVISTA, wenn Ihr Talk Pad Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn ein Gerät oder das Zubehör mechanisch beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden.

Weitere Informationen zum Service finden Sie auf REHAVISTA-Website unter Technische Hilfe: <https://www.rehavista.de/technische-hilfe>.

Interferenzen mit medizinischen Geräten



Das Talk Pad und ggf. sein Zubehör beinhalten Komponenten, die elektromagnetische Strahlung aussenden und ebenfalls an mehreren Stellen über Magnete verfügen. Grundsätzlich dürfen diese Produkte daher nicht auf eine Person gelegt, gestellt oder in sonstiger Form näher als 15 cm an oder auf eine Person gebracht werden, welche anderweitige und insbesondere invasive Medizinprodukte an- und verwenden. Ebenso dürfen diese Produkte nicht auf andere Medizinprodukte gelegt oder gestellt werden, die durch elektromagnetische oder magnetische Strahlungen beeinflusst werden könnten.



Ziehen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin bzw. den Gerätehersteller zu Rate, um genauere Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass Ihr Talk Pad mit Ihrem Herzschrittmacher, Shunt, Defibrillator oder einem anderen medizinischen Gerät interferiert, verwenden Sie es nicht länger.

Körperliche Beschwerden



Sprechen Sie mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin und verzichten Sie bis dahin auf den Gebrauch des Talk Pads, wenn andere körperliche Beschwerden auftreten (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), von denen Sie annehmen, dass sie durch den Gebrauch des Talk Pads verursacht sein könnten. Beispielsweise können bestimmte Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie epileptische Anfälle oder eine Bewusstlosigkeit erleiden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind.

5. Allgemeine Hinweise



Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig wie in dieser Anleitung beschrieben.



Beachten Sie Hinweistafeln und Hinweisschilder, die den Gebrauch von Mobilgeräten verbieten oder einschränken (zum Beispiel in Einrichtungen des Gesundheitswesens oder im Bereich von Sprengarbeiten). Ungeachtet der Tatsache, dass das Talk Pad unter der Maßgabe konstruiert, getestet und produziert wird, dass die Vorschriften bezüglich der Funkfrequenzemissionen eingehalten werden, können solche vom Talk Pad ausgehenden Emissionen den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen dieser anderen Geräte führen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es aufbewahren oder in eine Tasche stecken.

Wenn Sie Ihr Gerät bei heißen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht verwenden, kann es Temperaturen erreichen, die eine automatische Abschaltung auslösen. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um dauerhafte Schäden am Gerät zu verhindern. In diesem Fall warten Sie bitte, bis sich Ihr Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es neu starten.

Transportieren des Geräts

Achten Sie beim Transport darauf, dass Ihr Talk Pad ausreichend vor Stößen und Erschütterungen geschützt ist.

Es gibt strenge Vorschriften für Lithium-Ionen-Batterien in Flugzeugen. Die Vorschriften variieren von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft, daher sollten Sie sich vor Ihrer Reise mit Ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.

Reinigung und Desinfektion

Bevor Sie das Talk Pad reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies, leicht angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Geräteöffnungen eindringt. Fensterreinigungsmittel, Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel dürfen zum Reinigen des Geräts nicht verwendet werden.

In speziellen Umgebungen, z. B. Krankenhäusern, ist es notwendig, regelmäßig eine Wischdesinfektion am Gerät durchzuführen. Dies kann mit jedem Oberflächendesinfektionsmittel, das zur Desinfektion von Polycarbonat und Aluminium geeignet ist, durchgeführt werden.

Folgende Reinigungsmittel können z. B. verwendet werden: Mikrocid Sensitive Liquid oder Mikrocid Sensitive Wipes von der Firma Schülke & Mayr GmbH (www.schuelke.com). Führen Sie die Wischdesinfektion entsprechend den Angaben des Herstellers durch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt. Lassen Sie das Desinfektionsmittel mindestens eine Minute wirken, es verdunstet während dieser Zeit. Danach reinigen Sie den Bildschirm wie oben beschrieben.

Keinesfalls darf irgendein Bestandteil des Gerätes einer Dampf- oder Nasssterilisation unterzogen werden.

Wenn die Öffnungen der Lautsprecher verstopft sind, reinigen Sie diese vorsichtig mit Wattestäbchen und/oder einer Zahnbürste, um zu vermeiden, dass der Lautsprecher beschädigt wird.

Wartung

Für das Medizinprodukt ist ein Wartungsintervall von zwei Jahren festgelegt.

Die Maßnahmen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung sind ausschließlich durch den Hersteller oder einen von ihm zertifizierten Händler, der als Leistungserbringer vom jeweiligen gesetzlichen Kostenträger benannt ist, durchzuführen, soweit ihm dies rechtlich und tatsächlich möglich ist.

Die Wartung umfasst:

- die Instandhaltung der Medizinprodukte unter der Voraussetzung, dass er Zugang zu dem Produkt erhält,
- die Aufbereitung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben,
- die Durchführung der vor Inbetriebnahme erforderlichen Funktionsprüfung,
- die Dokumentation von Service- und Aufbereitungstätigkeiten.

! Wiedereinsatz

Diese Kommunikationshilfe eignet sich zur Wiederverwendung und zur Verwendung im Wiedereinsatzpool der gesetzlichen Krankenversicherungen. Dazu muss das Gerät entpersonalisiert werden. Das bedeutet, dass alle persönlichen Daten des vorherigen Benutzers / der vorherigen Benutzerin und sonstige Daten, die durch Anpassung personalisiert wurden, gelöscht werden müssen. Diese Entpersonalisierung wird von der REHAVISTA GmbH oder einem autorisierten Händler durchgeführt.

! Softwareupdates/Backups

Bei bestehender Internetverbindung werden Sie auf Softwareupdates hingewiesen. Dies betrifft sowohl Updates für die installierten (Kommunikations-) Apps als auch Updates für das Betriebssystem iPadOS. REHAVISTA prüft nach Erscheinen eines Updates die Kommunikations-Apps auf Kompatibilität mit dem aktuellen iPadOS-Betriebssystem.


Bitte prüfen Sie daher einige Wochen nach Erscheinen eines Updates, ob wir auf unserer Internetseite www.rehavista.de eine Updatewarnung veröffentlicht haben. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie das Update durchführen.

Bitte sichern Sie die Inhalte Ihres Talk Pads / Ihrer Kommunikations-App regelmäßig, aber insbesondere vor dem Durchführen eines Softwareupdates, um Datenverlust zu vermeiden (siehe hierzu Anleitung der Kommunikations-App).

6. Anwendung des Gerätes


Je nach Modell ist Ihr Talk Pad mit oder ohne eine Home-Taste ausgestattet. Das heißt: Einzelne Anwendungen können sich je nach vorhandenem Modell unterscheiden. Nachfolgend finden Sie nach Bedarf die Erläuterungen für beide Modellvarianten.

Talk Pad mit Home-Taste (Standard)

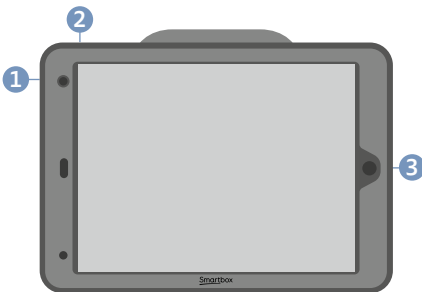

- 1 Ein-/Aus-Knopf
- 2 Lautstärketasten
- 3 Home-Taste

Talk Pad ohne Home-Taste (Mini)

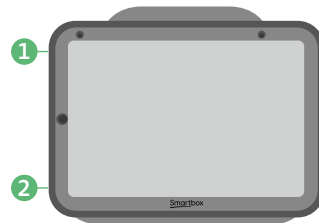

- 1 Ein-/Aus-Knopf
- 2 Lautstärketasten

Ein- und Ausschalten des Gerätes

Einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie ca. drei Sekunden lang den *Ein-/Aus-Knopf* 1 1 an der Seite des Gehäuses.

Standby-Modus

- Wenn das Talk Pad längere Zeit nicht benutzt wurde, geht es automatisch in den *Standby-Modus*.
- Um das Gerät aktiv in den *Standby-Modus* zu versetzen, drücken Sie den *Ein-/Aus-Knopf* 1 1 an der Seite des Gehäuses einmal kurz.

Standby-Modus beenden

Talk Pad mit Home-Taste:

Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie entweder 2 x die Home-Taste **3** oder 1 x den Ein-/Aus-Knopf **1** und 1 x die Home-Taste **3**.

Talk Pad ohne Home-Taste:

Drücken Sie einmal den Ein-/Aus-Knopf **1** an der Seite des Gehäuses und streichen Sie vom unteren Seitenrand nach oben.

Ausschalten

Talk Pad mit Home-Taste:


Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf **1** an der Seite des Gehäuses so lange gedrückt, bis der Schriftzug „Ausschalten“ erscheint. Schieben Sie dann den eingeblendeten Power-Button über den Schriftzug.

Talk Pad ohne Home-Taste:

Halten Sie gleichzeitig den Ein-/Aus-Knopf **1** an der Seite des Gerätes und eine der Lautstärketasten **2** gedrückt, bis der Schriftzug „Ausschalten“ erscheint. Schieben Sie dann den eingeblendeten Power-Button über den Schriftzug.

Lautsprecher ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten des Lautsprechers drücken Sie für ca. drei Sekunden den Ein-/Aus-Knopf auf der Oberseite des Lautsprechers.

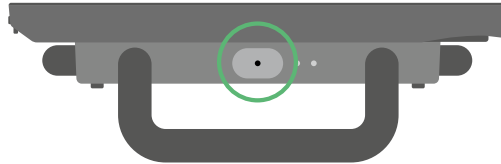

Akkuladestand überprüfen




Das Talk Pad verfügt über einen eingebauten Akku. Den Akkuladestand können Sie auf dem Home-Bildschirm überprüfen: Er wird dort oben rechts angezeigt.

Hinweis: Der Ladestand des zusätzlichen Lautsprechers vom Talk Pad wird nicht angezeigt!

Gerät und Lautsprecher laden

Wenn Sie Ihr Talk Pad aufladen, achten Sie darauf, dass das Gerät und der Lautsprecher gleichzeitig aufgeladen werden. Verbinden Sie mit dem passenden Kabel die Ladeanschlüsse 1 und 2 des Talk Pads mit dem Netzteil/Ladegerät. Dann verbinden Sie das Netzteil/Ladegerät mit einer 230 V-Steckdose. Am besten laden Sie Ihr Talk Pad, wenn es nicht in Gebrauch ist.

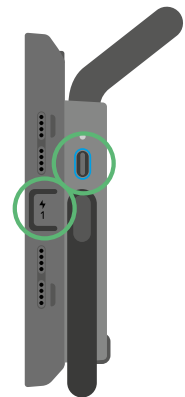

Neustart erzwingen (Reset)

Wenn das Talk Pad nicht wie gewohnt reagiert, hilft in der Regel ein Reset des Gerätes.

Talk Pad mit Home-Taste:

Drücken und halten Sie dazu den *Ein-/Aus-Knopf* ❶ zusammen mit der *Home-Taste* ❸ so lange gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und nach kurzer Zeit ein *weißer Apfel* erscheint. Nun können Sie die Tasten loslassen. Das Gerät führt jetzt einen Reset durch und fährt selbsttätig wieder hoch.

Talk Pad ohne Home-Taste:

Drücken Sie die *Lautstärketaste + (plus)* ❷ und lassen Sie schnell wieder los. Drücken Sie nun die *Lautstärketaste - (minus)* ❷ und lassen Sie schnell wieder los. Nun halten Sie die *Ein-/Aus-Taste* ❶ solange gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und nach kurzer Zeit ein *weißer Apfel* erscheint. Nun können Sie die Tasten loslassen. Das Gerät führt jetzt einen Reset durch und fährt selbsttätig wieder hoch.

Zum Home-Bildschirm wechseln

(Dies geht nicht, wenn „Geführter Zugriff“ aktiviert ist; siehe Seite 20).

Talk Pad mit Home-Taste:

Wenn Sie sich in einem Programm befinden, können Sie durch Drücken auf die *Home-Taste* ❸ zum *Home-Bildschirm* zurückkehren.

Talk Pad ohne Home-Taste:

Wenn Sie sich in einem Programm befinden, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand bis zum oberen Bildschirmrand, um zum *Home-Bildschirm* zurückzukehren.

Zwischen Apps wechseln und Apps beenden

Talk Pad mit Home-Taste:

Durch Doppelklick auf die *Home-Taste* **3** werden alle aktiven Apps in der Miniaturansicht angezeigt. Durch Wischen nach rechts und links können Sie die geöffneten Programme ansehen. Wenn Sie eines davon nutzen möchten, wählen Sie das gewünschte Programm aus, indem Sie mit dem Finger einmal darauf tippen. Um ein Programm komplett zu beenden, wischen Sie es in der Miniaturansicht mit dem Finger zum oberen Bildschirmrand.

Talk Pad ohne Home-Taste:

Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, stoppen Sie in der Mitte des Bildschirms und heben Sie Ihren Finger an. Nun werden alle aktiven Apps in der Miniaturansicht angezeigt. Durch Wischen nach rechts und links können Sie die geöffneten Programme ansehen. Wenn Sie eines davon nutzen möchten, wählen Sie das gewünschte Programm aus, indem Sie mit dem Finger einmal darauf tippen. Um ein Programm komplett zu beenden, wischen Sie es in der Miniaturansicht mit dem Finger zum oberen Bildschirmrand.

Kontrollzentrum

Grundlegende Einstellungen können im Kontrollzentrum vorgenommen werden. Zum Öffnen wischen Sie auf dem *Home-Bildschirm* mit einem Finger von der Akkuladestand-Anzeige (oben, rechts) nach unten. Zum Schließen des *Kontrollzentrums* wischen Sie es nach oben weg und tippen 1 x in den freien Bereich des Bildschirms.



Im Kontrollzentrum können Sie u.a. folgendes einstellen/erreichen:

- Grundlautstärke
- Bildschirmhelligkeit
- Ausrichtungssperre
- Kamera-App

Das Dock



Das sogenannte Dock befindet sich am unteren Bildschirmrand und kann von jeder App aus aufgerufen werden, indem mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand kurz nach oben gewischt wird. Nur durch das Einrichten des „geführten Zugriffs“ wird verhindert, dass das Dock eingeblendet wird.

Das Dock kann individuell gestaltet werden, z. B. indem es ausschließlich mit der Kommunikations-App bestückt wird. Durch Verwendung des Dock kann – wenn gewünscht – einfach zwischen den Apps gewechselt werden.

Geführter Zugriff

„Geführter Zugriff“ einrichten

„Geführter Zugriff“ verhindert, dass der/die Nutzer:in ein Programm beendet bzw. zwischen Programmen wechselt. Das aktuell ausgeführte Programm (z. B. GoTalk NOW) kann in diesem Fall nur mit einem Passwort beendet werden.

Um „Geführter Zugriff“ einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Einstellungen → Bedienungshilfen → (Allgemein) Geführter Zugriff

1. „Geführter Zugriff“ aktivieren (Schieberegler nach rechts streichen).
2. In den Codeeinstellungen einen Code für „Geführter Zugriff“ festlegen.
3. Die Einstellungen beenden und das Programm öffnen, das in „Geführter Zugriff“ bedient werden soll.
4. Bei einem **Talk Pad mit Home-Taste**, drücken Sie diese 3 x schnell, die Meldung „Geführter Zugriff gestartet“ erscheint kurz auf dem Bildschirm.
Bei einem **Talk Pad ohne Home-Taste** drücken Sie 3 x schnell auf den **Ein-/Aus-Knopf** an der Seite des Gerätes.

„Geführter Zugriff“ beenden

Drücken Sie 3 x schnell hintereinander die *Home-Taste* ODER (wenn diese nicht vorhanden ist) 3 x schnell den *Ein-/Aus-Knopf*.

Geben Sie Ihren Code ein und wählen Sie oben links „beenden“.

Die Meldung „Geführter Zugriff beendet“ erscheint kurz auf dem Bildschirm.

Kamera- und Foto-App

Um mit dem Talk Pad ein Foto oder ein Video aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:



- Öffnen Sie die Kamera-App.
- Wählen Sie den Foto- oder Videomodus aus.
- Foto: Fokussieren Sie das gewünschte Motiv (zoomen Sie ggf. über die eingblendete Leiste näher heran) und tippen Sie auf die weiße Auslösertaste am Bildschirmrand.
- Video: Nehmen Sie ein Video auf, indem Sie zum Starten auf die rot eingefärbte Auslösertaste drücken. Zum Beenden drücken Sie diese Taste erneut.
- Die mit der Kamera-App gemachten Fotos und Videos befinden sich in der Foto-App. Hier können Sie sie betrachten, bearbeiten und löschen.
- Tippen Sie das gewünschte Foto/Video in der Foto-App an, so dass es groß angezeigt wird. Durch Wischen nach rechts und links können Sie durch die Aufnahmen blättern. Bearbeiten und löschen können Sie das aktuell angezeigte Foto/Video über die eingblendeten Menüpunkte am oberen Bildschirmrand.
- Ist ein Foto/Video in der Foto-App gespeichert, können Sie es in Ihre Kommunikations-App einbinden (siehe entsprechende Anleitung der Kommunikations-App).

WLAN einrichten



Öffnen Sie die Einstellungen: Diese sind ggf. in einem Unterordner zu finden. Wählen Sie in der linken Spalte den Bereich „WLAN“ aus, streichen Sie hier den Schieberegler nach rechts auf grün.

Markieren Sie Ihr WLAN-Netz und geben Sie Ihren WLAN-Schlüssel ein. Schließen Sie die Einstellungen bzw. wechseln Sie zum Home-Bildschirm

Tasternutzung


Sobald ein kabelgebundener Taster in eine der zwei vorhandenen Tasteranschlüsse (S1 und S2) eingesteckt wird, aktiviert sich automatisch die iPad OS-Schaltersteuerung. Die gewünschten Funktionen des jeweiligen Tasters können unter *Einstellungen* → *Bedienungshilfen* → *Schaltersteuerung* eingestellt werden.

7. Anwendung der Kommunikationssoftware (App)

Bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung bzw. das Benutzerhandbuch der auf Ihrem Talk Pad verwendeten Kommunikationssoftware (App).

8. Tragegurt befestigen


Um den Tragegurt an Ihrem Talk Pad zu befestigen, ziehen Sie die dünne Schlaufe am Ende des Tragegurts durch die Anbringenspunkte, lösen Sie das Verbindungsstück und schieben Sie es durch die Schlaufe. Stecken Sie das Verbindungsstück wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

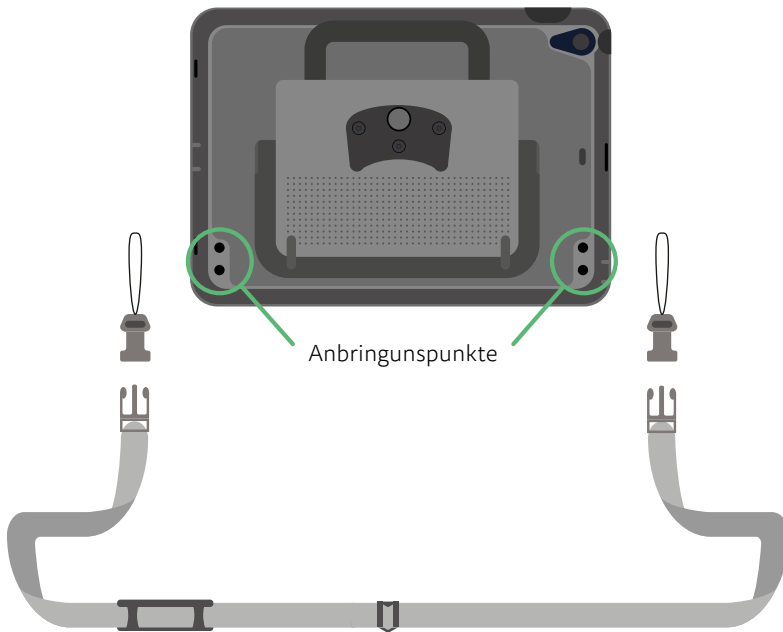

9. Support

Bei allen technischen Fragen rund um das Produkt helfen Ihnen die Mitarbeiter:innen unserer Support-Hotline gerne weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter (0421) 98 96 28 60 oder über das Kontaktformular Technische Hilfe unter www.rehavista.de.

Nah für Sie da!

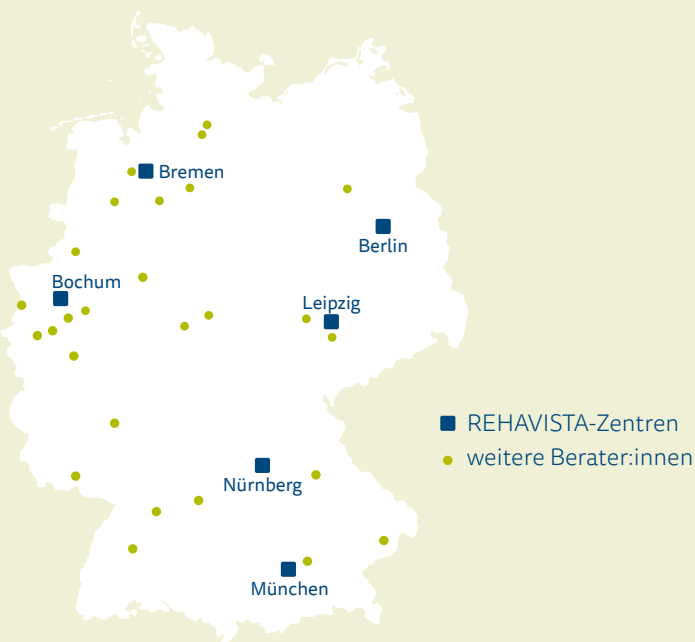

RO4909 | V.11 | 2024-07

REHAVISTA GmbH

Konsul-Smidt-Straße 8c
28217 Bremen

Hilfsmittel zur Kommunikation,
PC-Bedienung und Umfeldsteuerung

Sie erreichen uns unter:

Telefon 0421 - 98 96 28-20
Fax 0421 - 98 96 28-40

Technische Hilfe:

Telefon 0421 - 98 96 28-60
oder über das Kontaktformular
auf unserer Internetseite

www.rehavista.de



Kommunikation
ist Leben

REHAVISTA[®]
Smartbox family