




Kurzanleitung Universal-Montageplatte

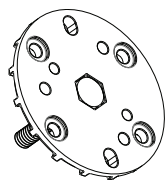


Runde Platte mit
Gewinde

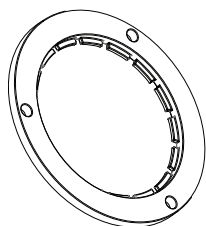


Ringadapter

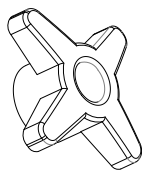


Arretierschraube

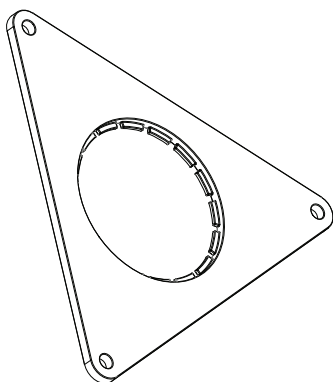


Großer Dreiecksadapter

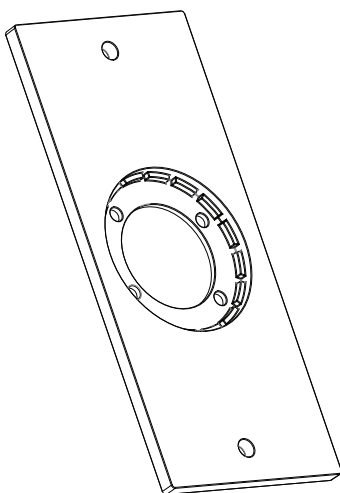


Großer Rechtecksadapter

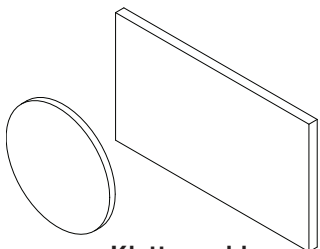


Klettverschluss

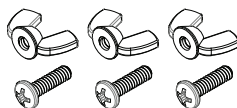

Befestigungsmaterial
Tasche mit grünem
Punkt

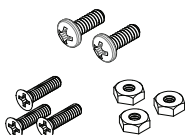

Befestigungsmaterial
Tasche mit blauem
Punkt

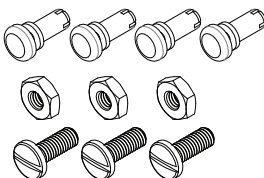


Befestigungsmaterial
Tasche mit gelbem Punkt

Montageoption 1

1. Befestigen Sie die Platte mit geeigneten Schrauben am Gerät.
2. Befestigen Sie die Arretierschraube an der Platte.
3. Befestigen Sie die Platte am Tragearm.
4. Verriegeln Sie das Gerät mit der Arretierschraube.

HINWEIS: Einige Teile bleiben nach dem Zusammenbau übrig.

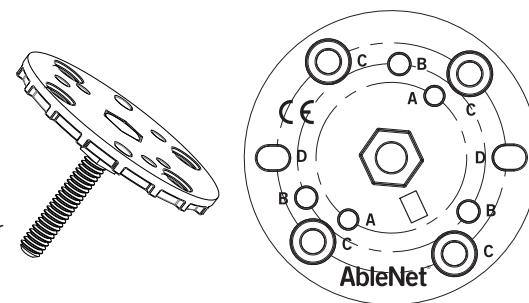

Produkt	Lochmuster	Befestigungsmaterial
- Buddy Button™ - Big Buddy™	A	In Tasche mit blauem Punkt
Specs Switch®	B	In Tasche mit blauem Punkt
iPad Cradles	C oder D	Befolgen Sie die Anleitungen des iDevice Cradle. Befestigungsmaterial mit iDevice Cradle mitgeliefert.
- Jelly Beamer™ Twist Transmitter - iTalk4™ mit Ebenen - BIG Candy Corn™	D	In Tasche mit blauem Punkt
- String Switch - Cap Switch - Cup Switch - LITTLE Candy Corn™	nicht verfügbar	Mit dem mitgelieferten Klettband an der Platte befestigen®.


Diese Montageoption dient als Ersatz für:

- Kleine runde Platte Nr. 100SCMP
- Cradle Platte Nr. 10045000

Montageoption 2

1. Setzen Sie die runde Platte mit Gewinde in den Ringadapter ein.
2. Befestigen Sie die Platte mit geeigneten Schrauben am Gerät.
3. Befestigen Sie die Arretierschraube an der Platte.
4. Befestigen Sie die Platte am Tragearm.
5. Verriegeln Sie das Gerät mit der Arretierschraube.

HINWEIS: Einige Teile bleiben nach dem Zusammenbau übrig.

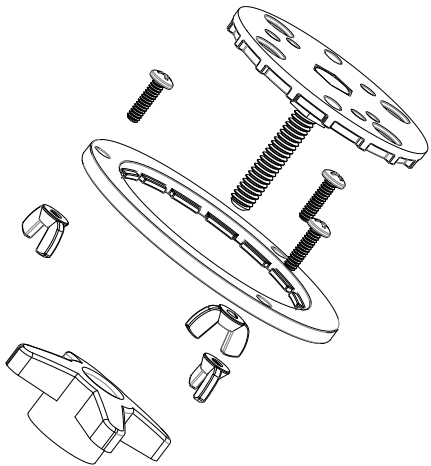

Produkt	Lochmuster	Befestigungsmaterial
• Jelly Bean® Twist • LITTLEmack™ • LITTLE Step-by-Step™ • LITTLE Step-by-Step mit Ebenen • LITTLE Step-by-Step Choice mit Ebenen • iTalk2™ mit Ebenen	nicht verfügbar	In Tasche mit grünem Punkt


Diese Montageoption dient als Ersatz für:

- Kleine dreieckige Platte Nr. 100STMP

Montageoption 3

1. Setzen Sie die runde Platte mit Gewinde in den großen Dreiecksadapter ein.
2. Befestigen Sie die Platte mit geeigneten Schrauben am Gerät.
3. Befestigen Sie die Arretierschraube an der Platte.
4. Befestigen Sie die Platte am Tragearm.
5. Verriegeln Sie das Gerät mit der Arretierschraube.

HINWEIS: Einige Teile bleiben nach dem Zusammenbau übrig.

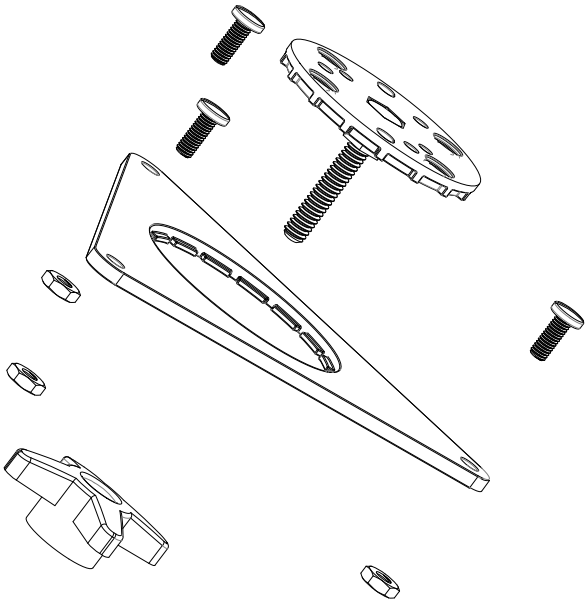


Produkt	Lochmuster	Befestigungsmaterial
• Big Red® • Big Beamer®	nicht verfügbar	In Tasche mit gelbem Punkt
• BIGmack® • BIG Step-by-Step™ • BIG Step-by-Step mit Ebenen		In Tasche mit gelbem Punkt


Diese Montageoption dient als Ersatz für:

- Große dreieckige Platte Nr. 100LTMP

Montageoption 4

1. Setzen Sie die runde Platte mit Gewinde in den großen Rechtecksadapter ein. Richten Sie die Löcher mit der Markierung C der Platte mit Gewinde mit den vier Löchern am großen Rechtecksadapter aus. Der Druck auf der runden Platte mit Gewinde sollte lesbar sein, wenn Sie den großen Rechtecksadapter horizontal halten. Siehe Beispiel unten.
2. Setzen Sie die vier Sperrstifte aus der Tasche mit dem roten Punkt in die Löcher mit der Markierung C an der runden Platte mit Gewinde ein. Die Sperrstifte können, falls erforderlich, entnommen werden.
3. Befestigen Sie die Platte mit geeigneten Schrauben am Gerät.
4. Befestigen Sie die Arretierschraube an der Platte.
5. Befestigen Sie die Platte am Tragearm.
6. Verriegeln Sie das Gerät mit der Arretierschraube.

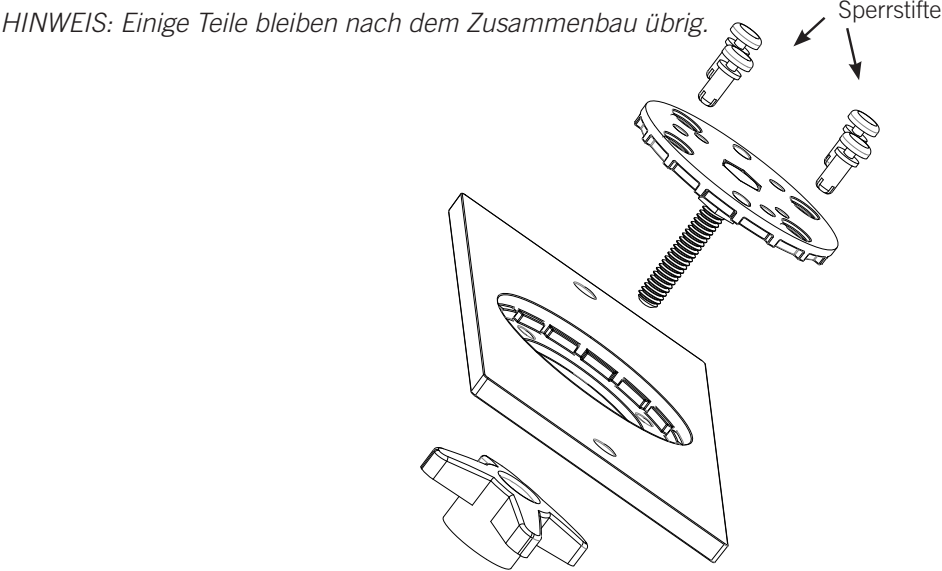

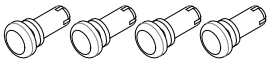Produkt	Lochmuster	Befestigungsmaterial
• QuickTalker™ 7, 12 oder 23 • SuperTalker FT™	nicht verfügbar	Mit dem mitgelieferten Klettband an der Platte befestigen®. In Tasche mit gelbem Punkt 

AbleNet®

Informationen zu Garantie/Reparatur/Rückgabe

AbleNet bietet eine zweijährige beschränkte Garantie für die Universal-Montageplatte. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com

Mehr Informationen über die Produkte und Services von AbleNet:

AbleNet, Inc
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (USA und Kanada)
www.ablenetinc.com
© 2019 AbleNet, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Montageoption dient als Ersatz für:

- Große rechteckige Platte Nr. 100LRMP
- EZ Montageplatte Nr. 10040800
- Relax/Mini Relax Platte Nr. 66160