

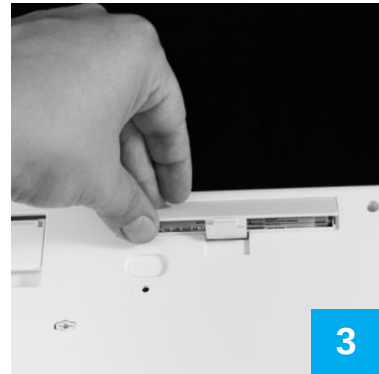


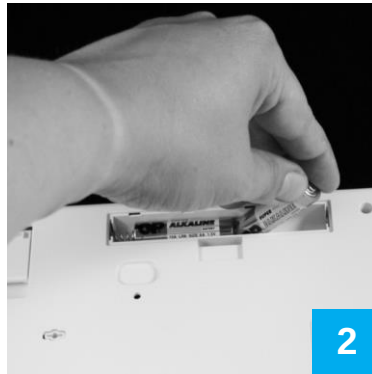

Bluetooth Clevy Keyboard - Gebrauchsanleitung Ausgabe März 2020

Batterien

Für die Stromversorgung der Tastatur werden 2 Stück AA Batterien (Mignon, LR6) benötigt.

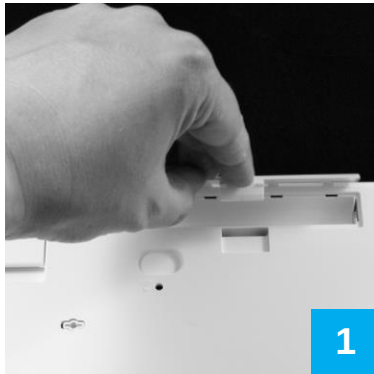

Bluetooth Verbindung herstellen

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Computers und suchen Sie nach Geräten. Dann betätigen Sie die versenkt angeordnete Taste an der Rückseite der Tastatur mit Hilfe eines Kugelschreibers oder eines anderen spitzen Gegenstandes.




Clevy is a registered trademark of BNC Distribution



Das Gerät "Clevy Bluetooth Keyboard" sollte erscheinen. Anschließend können Sie das Gerät aktivieren und benutzen, nachdem die auf Ihrem Betriebssystem notwendigen Schritte durchgeführt wurden.

Led Kontrollleuchten

Es gibt 2 Kontrollleuchten auf der Clevy Tastatur. An der linken Seite eine Blaue, diese kennzeichnet den Bluetooth Verbindungs Status. An der rechten Seite eine Rote, diese kennzeichnet den Betriebsmodus

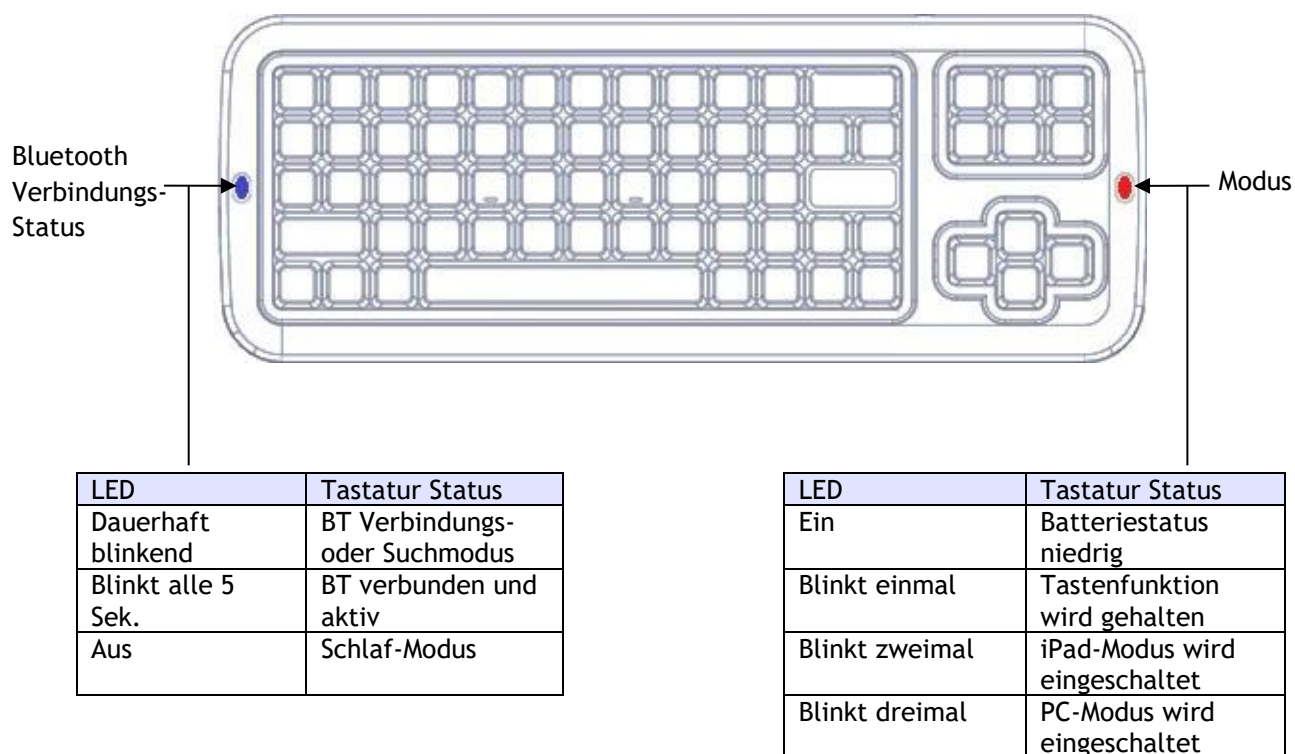

Bemerkung: Im Standby Modus sind alle LED ausgeschaltet.

Wiederholfunktion / Funktionstasten

An der Rückseite der Tastatur befindet sich ein Schiebeschalter. Man kann zwischen zwei Optionen wählen:

Key Repeat (Wiederholfunktion)


Wiederholung eines Zeichens, wenn der Benutzer die entsprechende Taste dauerhaft gedrückt hält.

Function Keys Tool (Funktionstasten)


Wenn eine der Tasten F, ALT, Alt Gr, Strg, SHIFT, 'Windows' oder 'Apple' länger als 2 Sekunden gedrückt wird, ist diese Taste "eingerrastet". Jetzt kann eine weitere Taste betätigt werden, um eine Kombination zu erzeugen. Zum Beispiel: Taste ALT für 2 Sekunden betätigen, dann Taste "F" für 2 Sekunden betätigen und abschließend Taste "4" wird das Kommando "ALT+F4" erzeugen.

Clevy is a registered trademark of BNC Distribution

Bemerkung: Eine "eingerastete" Taste kann man durch nochmaliges Betätigen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

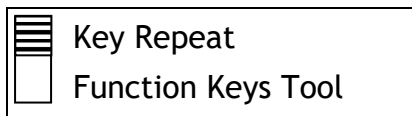

Wiederholfunktion **EIN** / Funktionstasten **AUS**

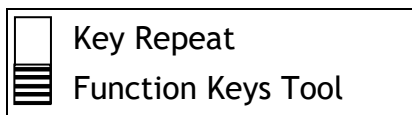


Wiederholfunktion **AUS** / Funktionstasten **EIN**

iPad / Computer modes

Der Standardmodus der Tastatur ist der "Computermodus". Dieser Modus funktioniert mit jedem Gerät inclusive iPads. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie Strg-Alt-I für "iPad-Modus" und Strg-Alt-C für "Computermodus". Im iPad-Modus kann der Benutzer auf spezielle Funktionen zugreifen, die für das iPad entwickelt wurden.

Bitte beachten Sie, dass durch einen Batteriewechsel der Modus auf den Standard "Computermodus" zurückgesetzt wird.

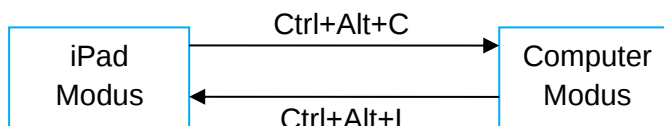

iPad Modus

Dieser Modus bietet zwei für das iPad angepasste Verknüpfungen:

- Home (Startbildschirm) = Alt+Ctrl+H
- AltGr = Links+Rechts

Computer Modus

Dieser Modus entspricht einer herkömmlichen PC-Tastatur.

Für weitere Fragen finden Sie hier mögliche Antworten: www.clevy.com/fag oder schreiben Sie uns an diese Email Adresse: info@bnc-distribution.com

V1.0 / 10.03.2020 / OV: Mar 2020

Hersteller: BNC Distribution, Wasaweg 3a, 9723 JD Groningen, Niederlande

© für die deutsche Übersetzung REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8C, 28217 Bremen

Clevy is a registered trademark of BNC Distribution

