




TiPY™

First Steps


①

Handpad abziehen.
TiPY™ auf rechte Seite drehen (ESC rechts oben).

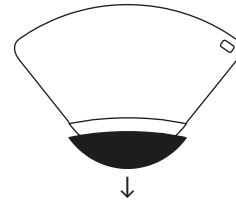


②

Schutzfolie beim Batteriefach entfernen.

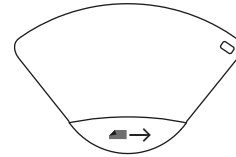

③

Die TiPY™ mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Ihrem PC verbinden.
ESC leuchtet rot. ESC blinkt rot im Ladevorgang. Die Batterie ist vorgeladen.

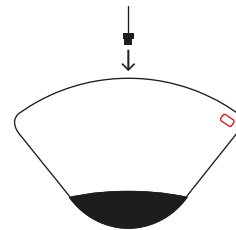

Inbetriebnahme der
TiPY™




Die Tasten **Fn** + **+** drücken.
Fn blinkt schnell **grün**. Anschließend ...

... für **Apple-Produkte** **P1** drücken.
Die LED im Handpadbereich leuchtet **grün**. ●

... für **Windows, Linux oder Android-Produkte** **P1** drücken.
Die LED im Handpadbereich leuchtet nicht. ○

Einstellung des
Betriebssystems

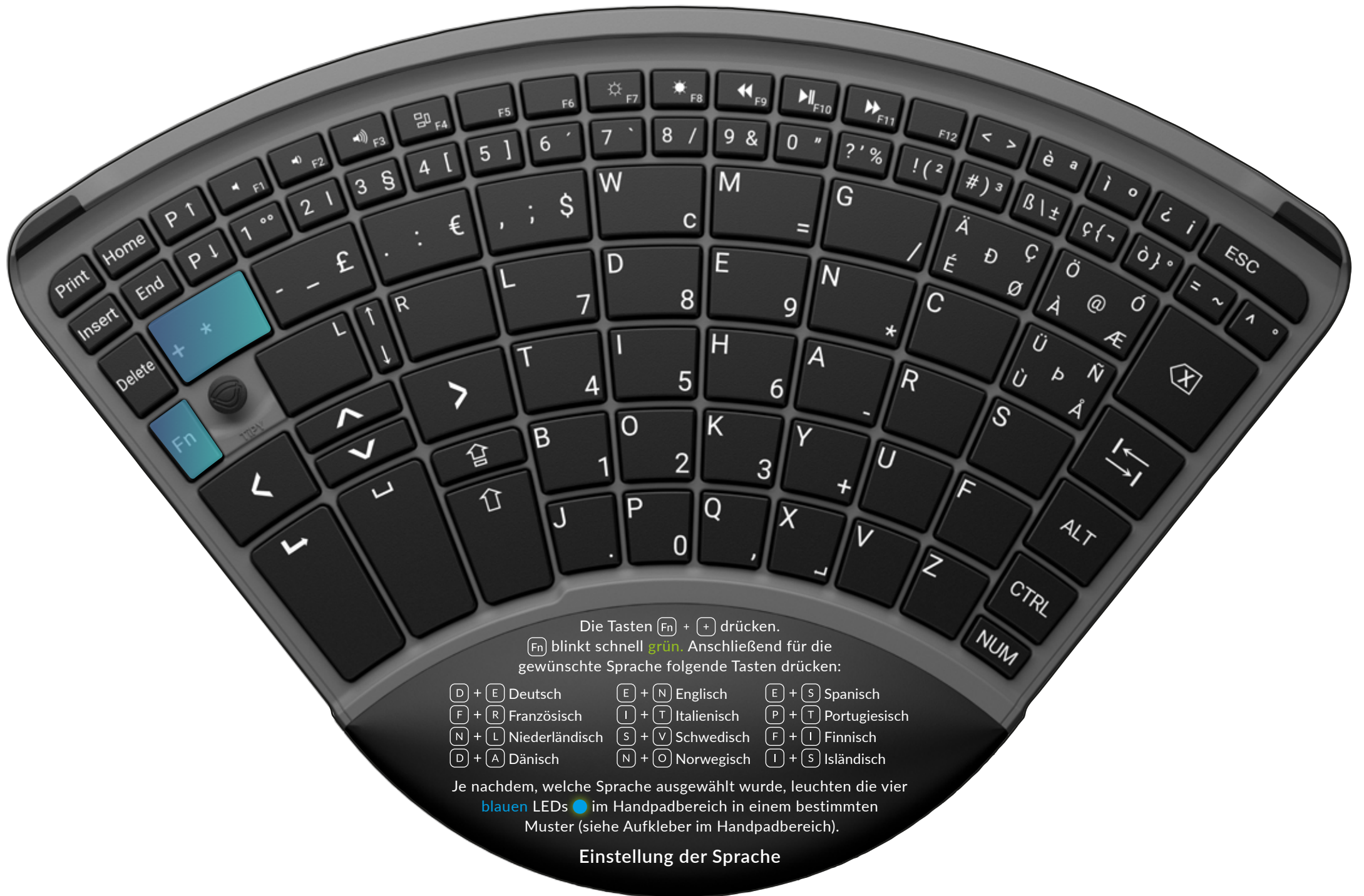

Die Tasten **Fn** + **+** drücken.
Fn blinkt schnell grün. Anschließend für die gewünschte Sprache folgende Tasten drücken:


- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| D + E Deutsch | E + N Englisch | E + S Spanisch |
| F + R Französisch | I + T Italienisch | P + T Portugiesisch |
| N + L Niederländisch | S + V Schwedisch | F + I Finnisch |
| D + A Dänisch | N + O Norwegisch | I + S Isländisch |

Je nachdem, welche Sprache ausgewählt wurde, leuchten die vier blauen LEDs im Handpadbereich in einem bestimmten Muster (siehe Aufkleber im Handpadbereich).

Einstellung der Sprache



Verbindung mittels USB-C

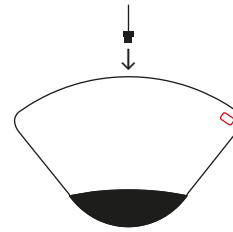


Die **TiPY™** mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Ihrem PC verbinden.

(ESC) leuchtet beständig **rot**. **TiPY™** ist direkt am PC angeschlossen und die Batterie wird, wenn leer, geladen (**(ESC)** blinkt **rot**).



Verbindung mittels Bluetooth

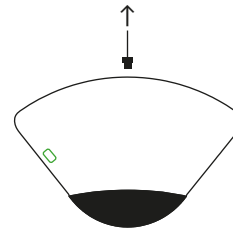

USB-C-Kabel abstecken. **(Fn)** blinkt **grün**. **TiPY™** sucht ohne Kabel automatisch nach einer Bluetooth-Verbindung. **TiPY™** scheint am PC in der Bluetooth-Verbindungsliste auf. Wählen Sie **TiPY™** aus und folgen Sie den am Bildschirm angegebenen Schritten, um Ihre Geräte zu verbinden. Wenn verbunden, leuchtet **(Fn)** beständig **grün**.

Bei einer Bluetooth-Störung blinkt **(Fn)** sehr schnell. In diesem Fall entfernen Sie die bestehende **TiPY™** Verbindung mit Ihrem Computer und verbinden Sie neu. Die **TiPY™** Bluetooth-Verbindung kann nur von dem verbundenen Computer aus gelöscht werden.

Verbinden der
TiPY™
mit Ihrem PC

TiPY™ geht nach einer Verwendungspause in den Standbymodus und danach in den Sleepmodus. Ihre TiPY™ kann mit jeder Taste geweckt werden.
ESC blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist.

Jede TiPY™ ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Ziehen Sie, um die Tastatur zu wechseln, das Handpad ab, drehen Sie die Tastatur auf die gewünschte Seite und stecken Sie das Handpad wieder auf. TiPY™ erkennt automatisch, welche Seite verwendet wird, und deaktiviert die Unterseite. Je nachdem, welche Seite verwendet wird, ist der Mausjoystick auf der Seite des Daumens.



Bedienung mit linker Hand






Bedienung mit rechter Hand




Drücken Sie, um den Nummernblock zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Taste NUM. Diese leuchtet bei aktiviertem Nummernblock blau.

Good to know
TiPY™



Die Maus wird mit dem Mausjoystick und den daneben angebrachten Tasten  für Linksklick,  für Rechtsklick sowie  zum Scrollen bedient.

Mausfunktion der
TiPY™

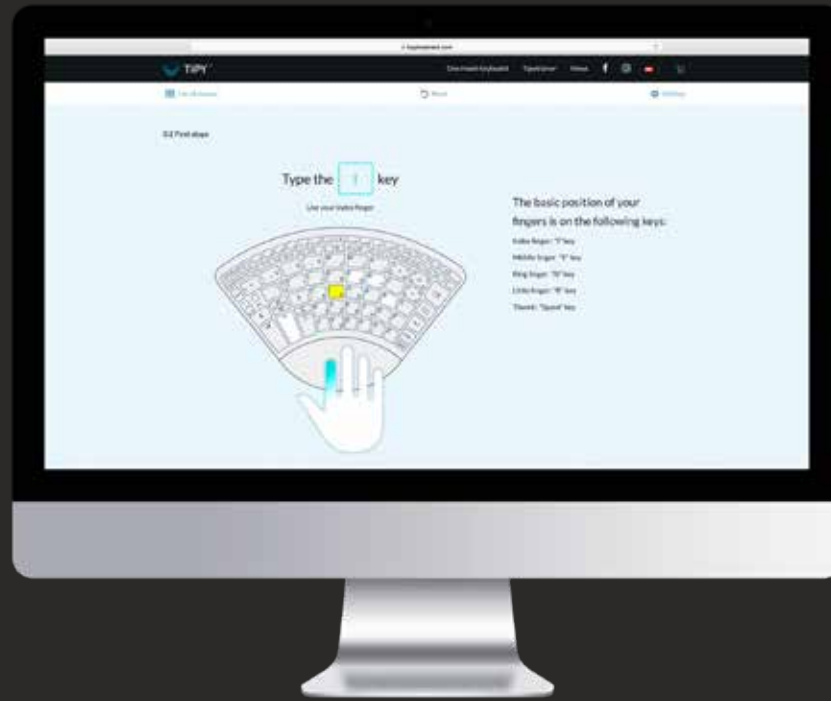

TiPY™ Trainer, free to use on
tipykeyboard.com



TiPY™