


GEBRAUCHSANWEISUNG

SMOOTHIE 125

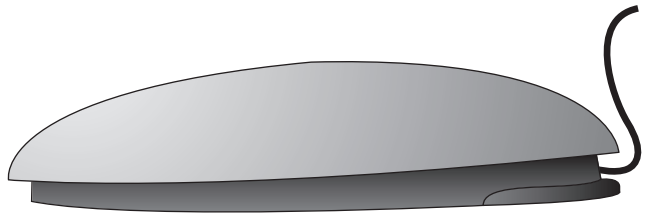

Packungsinhalt

Bitte prüfen Sie den Inhalt
des Paketes auf:

Smoothie 125

**diese
Bedienungsanleitung**

Produktbeschreibung

Ihr **Smoothie 125** ist ein robuster, kabelgeführter Schalter mit einem Durchmesser von 125mm (5"). Dieser ermöglicht die Nutzung von unterstützenden Schalteranwendungen, die über einen 3.5mm (1/8") Klinkenstecker verfügen. Mit seiner geringen Höhe, der leichten Neigung und der geringen benötigten Betätigungskraft, ist er sehr leicht zu bedienen. Die erhältlichen Farben sind rot,

gelb, grün und blau und können ausgetauscht werden. Hierfür benötigt man einen Schraubendreher, damit ein Entfernen durch den Nutzer nicht selbst vorgenommen werden kann. Der **Smoothie 125** kann durch die werkseitig angebrachten Bohrungen fest mit dem Untergrund verbunden werden. Passende Montageplatten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und Pretorian Technologies.

Kompatibilität

Der Smoothie 125 funktioniert mit jedem Hilfsmittel, welches über einen 3.5mm Klinkenstecker verfügt. Verbinden Sie dieses zuerst und drücken Sie anschließend den Schalter, um ihn zu aktivieren. Sollte der Nutzer seine Hand nicht auf der Schalteroberfläche ablegen können, ohne diesen zu drücken, so ermöglicht die Neigung des Smoothie 125 die Ablage der Hand direkt vor dem Schalter. Dann kann der Nutzer seine Hand ganz einfach hinüberschieben, um ihn zu drücken.

Befestigung

Der Smoothie 125 hat ein standardisiertes dreieckiges Befestigungssystem. Der Abstand zwischen den Bohrungen beträgt 63.5mm (2.5") und die Gewindegröße ist die M4 (4mm). In Ländern ohne metrisches Maßeinheiten, erhalten Sie das Befestigungsmaterial von Ihrem Fachhändler. Pretorian empfiehlt das Rehadapt - Befestigungssystem.

Wartung und Reinigung

Der Smoothie 125 wurde für eine jahrelange zuverlässige Nutzung konzipiert. Dies unterstützen Sie, indem Sie das Gerät nicht am Kabel transportieren, das Kabel nicht um den Schalter wickeln und ihn nicht extremen Temperaturen aussetzen.

Zum Reinigen Ihres Smoothie 125, wischen Sie ihn einfach mit einem feuchten Tuch ab. Milde Reinigungsmittel können Sie verwenden aber bitte keine Bleich- oder Scheuermittel.

Ihr Smoothie 125 ist wartungsfrei. Sollte eine Reparatur nötig sein, so senden Sie das Gerät dazu an den autorisierten Fachhändler oder an Pretorian Technologies.

Gewährleistung

Ihr Smoothie 125 bietet eine Gewährleistung von 2 Jahren gegen Herstellungs- oder Komponentenfehler. Das Gerät wurde für den Heim- und Bildungsgebrauch entwickelt. Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche. Durch nicht fachmännisch ausgeführte Reparaturen oder Modifizierungen, mechanische Gewalteinwirkung, Einwirkungen von Flüssigkeiten sowie eine Nutzung mit inkompatiblen Geräten, erlischt ebenfalls der Gewährleistungsanspruch.

Pretorian
TECHNOLOGIES
Inspired by You!

Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB United Kingdom

Tel +44 (0) 1427 678990



European Healthcare & Device Solutions Ltd.

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC. Republic of Ireland.



(Adresse der Vertretung in Irland – bitte nicht zur Korrespondenz mit Pretorian nutzen!)

www.pretorianuk.com