



Anschließen des Tasters

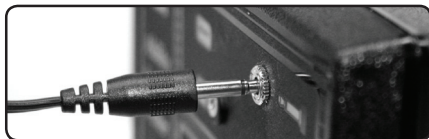

Ein Einzeltaster kann an der standardmäßigen 3,5-mm-Monobuchse eines beliebigen adaptierten Gerätes eingesteckt werden.

Hinweis: Für die Verwendung am Computer ist ein Tasteranschluss erforderlich (nicht inbegriffen).

Drücken* der Aktivierungsfläche

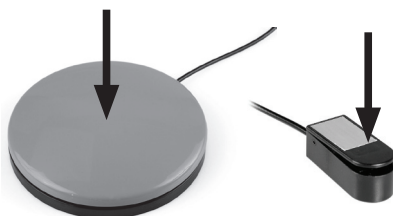

Sobald die Aktivierungsfläche gedrückt ist, wird jedes angeschlossene Gerät aktiviert.

**String, Grasp- und Tip-Taster werden durch Ziehen, Drücken oder Kippen aktiviert.*

Weitere Informationen

Lagerung und Pflege

Den Taster vor der Reinigen vom Gerät trennen und mit einem feuchten Tuch oder Alkohol abwischen.

Nicht am Kabel ziehen und dieses nicht um den Taster wickeln.

Nicht in Wasser eintauchen oder mit Lösungsmitteln reinigen.

Nicht versuchen, den Taster zu öffnen oder auseinanderzubauen.

Taster nicht extremer Hitze oder Kälte aussetzen.

Montageoptionen

AbleNet-Taster können auf verschiedene Arten montiert werden. Für die Befestigung auf flachen Oberflächen und einfache Befestigungen können Cling!TM Produkte oder Velcro[®] Klebbänder verwendet werden.

Für komplette Befestigungssysteme und Verbindungen für den jeweiligen Taster besuchen Sie unser Online-Geschäft unter www.ablenetinc.com. Gehen Sie zu der spezifischen Produktseite und klicken Sie auf „Related Items“ (Verwandte Produkte).

Weitere Funktionen

Big Red- und Jelly Bean-Taster:

Zum Befestigen eines Bildes oder Symbols auf den Big Red- und Jelly Bean-Tastern kann eine Tastenkappe (separat erhältlich) verwendet werden.

Im Lieferumfang der Big Red- und Jelly Bean *twist* Taster sind vier abschraubbare Tastflächen enthalten. Zum Abnehmen die Tastfläche fest nach links und zum Anbringen nach rechts drehen.



Farbige Aufkleber

Der Taster kann mit farbigen Aufklebern (falls im Lieferumfang enthalten) individuell gekennzeichnet werden.

Tasterabdeckungen

Die Stoffabdeckung des Tasters (falls im Lieferumfang enthalten) kann ggf. mit einem milden Waschmittel per Hand gewaschen werden.

Garantie

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie sowie Informationen zur Rücksendung/Reparatur können auf www.ablenetinc.com eingesehen werden. Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956
www.ablenetinc.com