




Rote Anzeigen

Es gibt 2 rote Anzeigen an der Clevy-Tastatur, an der linken und an der rechten Seite.

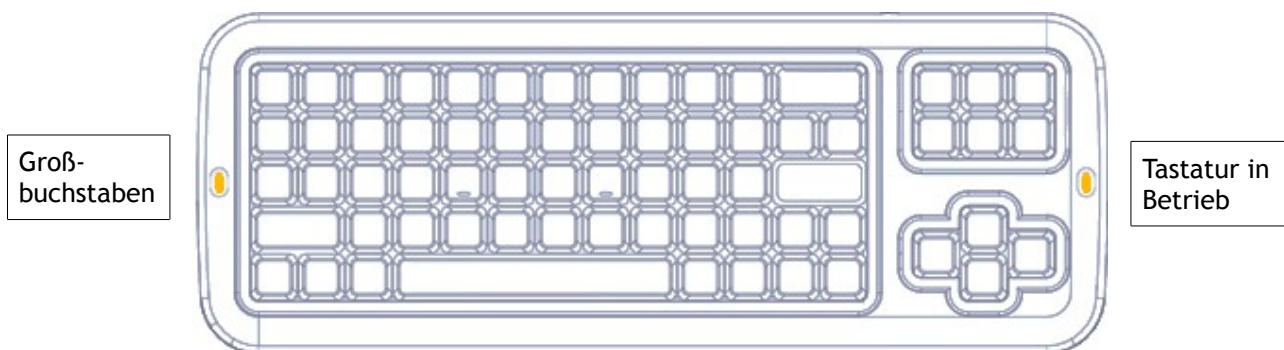

Bedeutung an der linken Seite: Großbuchstaben sind gewählt. Bedeutung an der rechten Seite: Tastatur ist angeschlossen und betriebsbereit.

Einstellungen des Schiebeschalters

Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich ein Schiebeschalter. Hier kann man zwischen 2 Einstellungen wählen:

Position des Schiebeschalters	Beschriftung am Gerät	Funktion	Erklärung
Oben	Key Repeat	Wiederholfunktion	Bei längerem Betätigen einer Taste wird dieses Zeichen wiederholt. Nach der im Betriebssystem eingestellten Tastenwiederholrate wird durch Drücken und dann Verweilen auf einer Taste wiederkehrend dasselbe Zeichen immer wieder zum Computer übertragen
Unten	Function Keys Tool	Funktions-tasten	Bei Betätigen der Taste "F" und einer Zahlentaste wird die entsprechende Funktionstaste erzeugt (F1 - F10). Beispiel: F+ 4 = F4. Für F11 and F12: drücken und halten Sie die "F" Taste und betätigen die Tasten zwischen "Schritt zurück" und "Enter" (Ü und + auf der deutschen Tastatur)

Wenn Sie die Wiederholfunktion Option benutzen möchten und auch die Möglichkeit eine Funktionstaste einzugeben, können Sie die "Function-Key Software" von www.clevy.com (Tastaturseite) herunterladen.

Tastenwiederholrate einstellen

Sie können bei Bedarf die Tastenwiederholrate ändern.

WINDOWS-Benutzer machen dies im so oder ähnlich – abhängig von der WINDOWS-Version – genannten Fenster „Eingabehilfen – Einstellungen für die Anschlagverzögerung – Erweiterte Einstellungen für die Anschlagverzögerung – Wiederholgeschwindigkeit – Wiederholrate“ unter „Einstellungen – Systemsteuerung“.

Mac-Benutzer finden die Einstellungen unter „Systemeinstellungen – Tastatur- und Mauseinstellungen“.

Wartung

Ihr *Clevy Keyboard Simply Works* besitzt keine Teile, die gewartet werden müssen. Sollte eine Reparatur notwendig werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Merkmale

Konstruktion	geschlossenes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
Abmessungen Breite * Höhe * Dicke	476 mm (B) * 182 mm (H) * 40 mm (D)
Gewicht	ca. 1250 g

Garantiezeit

2 Jahre.

Hilfsmittelverzeichnis

HMV-Nr.: 16.99.05.0900



Die Hilfsmittelnummer gibt nicht in jedem Fall eine im Hilfsmittelverzeichnis gelistete Nummer an. Wenn Sie sich ausführlicher zu diesem Thema informieren wollen, informieren Sie sich bitte bei den Informationen zum Produkt unter www.rehavista.de.

Einsatzgebiete

Typische Indikation: ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, Verletzungsfolgen, spastische und schlaffe Lähmungen, neurologische bzw. psychologische Störungen

Support

Sie erreichen uns montags bis freitags von 8:30-12:30 Uhr telefonisch unter 01804-321012 (0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk bis zu 0,42 € pro Minute) und per E-Mail unter support@rehavista.de. Außerdem können Sie sich an Ihren regionalen **REHAVISTA**-Partner wenden – s.a. www.rehavista.de.

Hersteller



BNC Distribution • Wasaweg 3a • 9723 JD Groningen • The Netherlands
T +31 (0)50 850 6960 • F +31 (050) 850 6969
www.bnc-distribution.com • www.clevy.com

© für die deutsche Übersetzung:

REHAVISTA GmbH • Forckenbeckstrasse 9-13 • Haus 225 - 1 OG. • 14199 Berlin