



Allora 2

Tipps und Speicherdokumentation

Aussage vorlesen



Aussage aus Display löschen (alles)



1 Zeichen löschen (1 Buchstaben oder Zeichen)



Sprachausgabe lauter




Sprachausgabe leiser



Aussage abspeichern

1. Abzuspeichernde Aussage eingeben, dann:



und Buchstaben wählen, unter dem diese abgespeichert werden soll
(bestätigen mit ).

Aussage aufrufen



und den Buchstaben, unter dem die gewünschte Aussage liegt, wählen.

Aufrufen des Einstellmenüs



Für weitergehende Informationen vgl. Sie bitte die Anleitung oder kontaktieren Sie Ihren regionalen REHAVISTA-Partner.



Speicherdokumentation

In dieser Tabelle können Sie notieren, welche Aussage Sie unter welcher Taste gespeichert haben, um diese schnell abrufen zu können.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	



U	
V	
W	
X	
Y	
Z	