



Kurzanleitung: Step-by-Step™ mit Ebenen Kommunikator

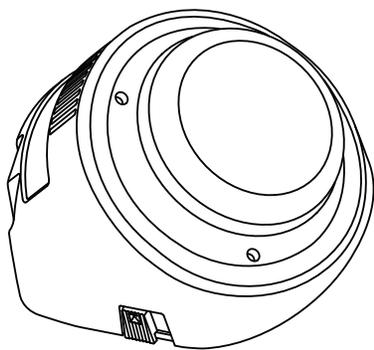


1 Auswahl der Tasterfarbe

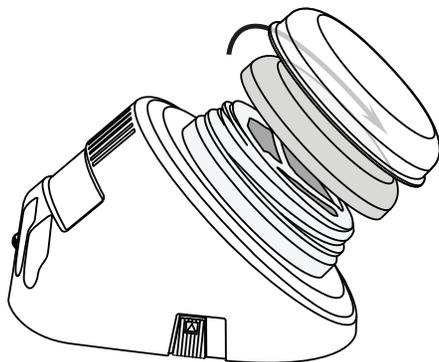

Das Oberteil des farbigen Tasters fest nach links drehen und abnehmen. Zum Anbringen der neuen Farbe den Deckel bis zum Anschlag nach rechts drehen.

Im Lieferumfang des Step-by-Step mit Ebenen ist eine Tasterkappe enthalten. Ein Bild oder ein Symbol auf die Oberseite des Tasters legen und durch Aufdrücken der Kappe auf dem Taster befestigen.

2 Batterien einlegen und einschalten

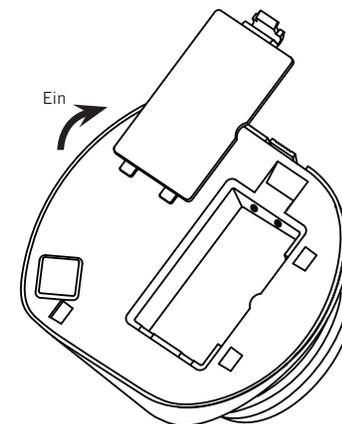


An der Unterseite des Gerätes eine 9-Volt-Batterie einlegen. Zum Einschalten des Gerätes den Lautstärkereglер drehen.

Zum Wechseln der Batterie muss die Bodenplatte des Step-by-Step mit Ebenen abgenommen werden. Dazu die Sperrlasche drücken und die Bodenplatte abziehen.



www.ablenetinc.com

3 Die Ebene wählen und in den Aufnahme-Modus umschalten

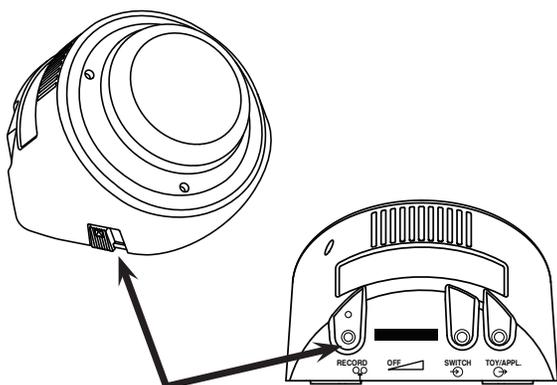


Drücken und auswählen

Den RECORD-Knopf gedrückt halten, bis die RECORD-Lampe leuchtet. Dann loslassen.

Über den Level-Schalter (an der Seite des Gerätes) die gewünschte Ebene auswählen.

4 Eine Reihe von Sprachmitteilungen aufzeichnen

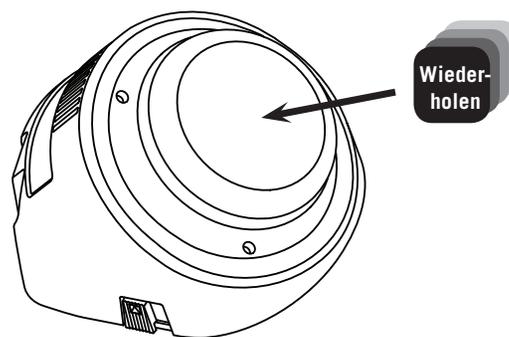


Die Tasteroberfläche gedrückt halten und beim Ertönen des Tonsignals zu sprechen beginnen. Am Ende der Aufzeichnung den Taster loslassen.

Für die weitere Mitteilungen in einer Sequenz wiederholen.

In die nächste Ebene wechseln und die obigen Schritte wiederholen, um weitere Ebenen aufzuzeichnen.

Während der Aufnahme blinkt die RECORD-Lampe.

5 Den Aufnahme-Modus beenden

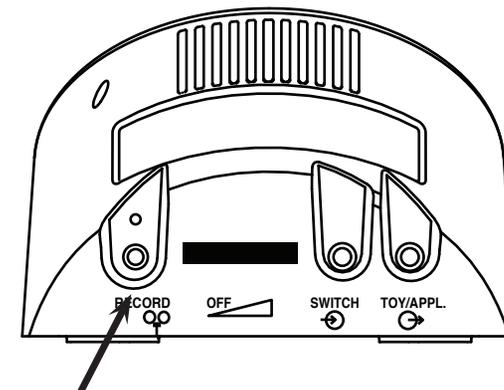


Drücken und loslassen

Den RECORD-Knopf drücken und loslassen, um den Aufnahme-Modus zu beenden. Damit ist der Step-by-Step mit Ebenen einsatzbereit.

HINWEIS: Dieses Gerät verfügt über insgesamt 4 Minuten Aufnahmezeit. Wenn nur noch zehn Sekunden verbleiben, blinkt die Lampe gelb.

Erweiterte Funktionen

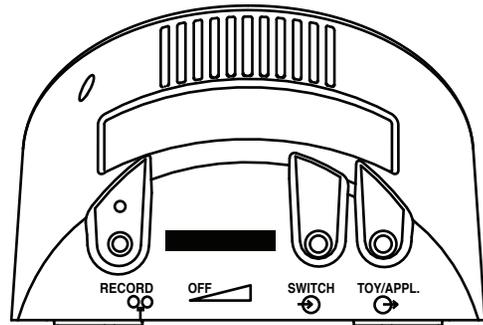

Aufnehmen
(1x für Wiederholung drücken)

Externer Taster

Spielzeug/Geräte-
Anschluss

Wiedergabe einer Sprachmitteilung über einen externen Taster

Den gewünschten Taster mit einem 1/8-Zoll-Stecker (3,5 mm) am Tastereingang einstecken.

Steuerung von Spielzeug oder anderen Geräten


Während der Aufzeichnung einer Sprachmitteilung den Aufnahme-Knopf einmal (1x) drücken, um dieser Mitteilung ein Spielzeug/Gerät zuzuordnen. Bei der Wiedergabe dieser Nachricht wird das angeschlossene Spielzeug oder Gerät für die Dauer der gespeicherten Aufzeichnung aktiviert.

HINWEIS: Für die Steuerung eines Elektrogerätes muss ein PowerLink® 3-Adapter verwendet werden. Informationen über die Anpassung von Spielzeug und Elektrogeräten finden Sie auf unserer Website www.ablenetinc.com

Wiederholen einer Nachricht


1. Die Sprachmitteilung, die wiederholt werden soll, abspielen.
2. Am Ende der Mitteilung einmal den Aufnahme-Knopf drücken. *Mit jeder Aktivierung der Tasteroberfläche wird die gleiche Sprachmitteilung wiederholt.*
3. Um mit der nächsten Aufzeichnung fortzufahren, muss der Aufnahme-Knopf wieder einmal (1x) gedrückt werden.

Produktabbildung und Garantie

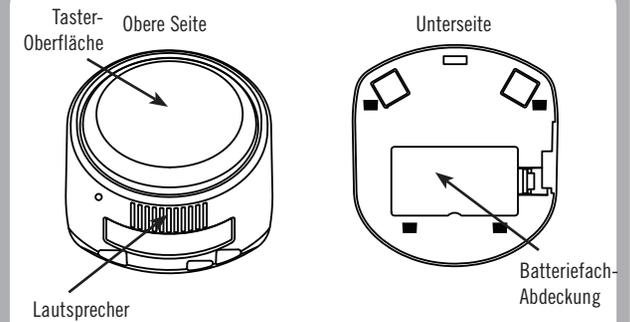

Lautsprecher

Batteriefach-
Abdeckung

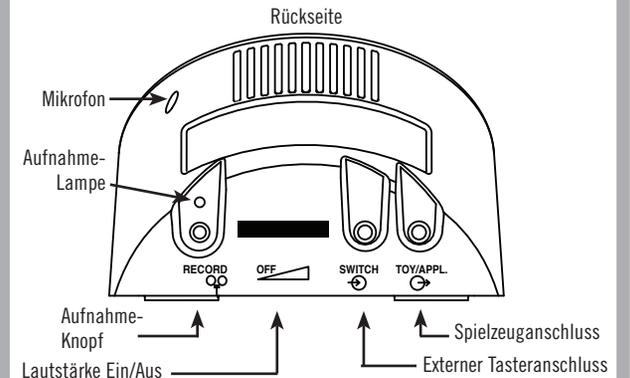

Aufnahme-
Knopf


Lautstärke Ein/Aus

OFF

SWITCH

TOY/APPL.

Spielzeuganschluss
Externer Tasteranschluss

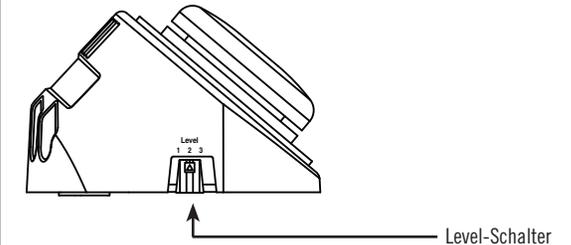

Level-Schalter

Montageoptionen

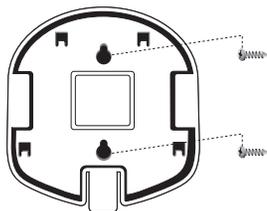


Abb. A

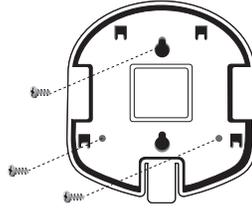


Abb. B

Befestigen mit der Bodenplatte

Die Bodenplatte durch Drücken der Sperrlasche lösen und nach hinten vom Gerät abziehen.

Zum Anbringen der Bodenplatte die vier Stifte der Bodenplatte auf die dazugehörigen Löcher im Step-by-Step mit Ebenen ausrichten. Die Bodenplatte vorschieben, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Für die kurzzeitige Befestigung kann eine Flachkopfschraube (Gr. 8) mit den zwei senkrechten Schlitzen in der Bodenplatte verwendet werden. (Abbildung A)

Zur permanenten Befestigung die Bodenplatte durch die drei Löcher (links abgebildet) hindurch festschrauben. (Abbildung B)

Weitere Montageoptionen (auf www.ablenetinc.com)

- UltraStik® oder Dual Lock™ für flache oder senkrechte Oberflächen
- Tragegürtel oder -riemen
- Montagesysteme:
Universelles Montagesystem mit Drehknopf oder Hebel
Slim Armstrong®
Sensitrac Auflagepolster
Sensitrac Polster mit verstellbarem Arm

Hinweis: Bei der Bestellung von Montagesystemen muss die kleine bzw. große dreieckige Montageplatte angegeben werden.

Slim Armstrong
Befestigungssystem



Hinweise zur Garantie/Reparatur/Rücksendung

AbleNet bietet eine einjährige beschränkte Garantie für den Step-by-Step mit Ebenen. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com

Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (USA und Kanada)
Internet: www.ablenetinc.com

© 2007 AbleNet, Inc., Alle Rechte vorbehalten.