

TD Snap Windows Migrationsprozess


Da Tobii Dynavox nun ein eigenständiges Unternehmen ist, muss TD Snap für Windows einem speziellen, einmaligen Migrationsupdate unterzogen werden, damit unsere TD Snap Windows Kunden Zugang zu den neuesten Funktionen und Updates erhalten können. Beachten Sie, dass für TD Snap für iPadOS keine entsprechende Migration erforderlich ist; es wird weiterhin normal aktualisiert. Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte, um die Migration durchzuführen, sobald sie verfügbar ist.



Vor der Migration

Bevor Sie mit dem Migrationsprozess beginnen, müssen Sie:

- Eine **stabile Internetverbindung** haben
- Sicherstellen, dass die **TD Snap Software auf dem neuesten Stand ist** und gegebenenfalls ein Update durchführen

Aktualisieren Sie TD Snap, wenn die Migrationsfunktion verfügbar ist:

1. Sollte ein Software-Update erforderlich sein, wird sich ein Pop-up-Fenster öffnen, wenn Sie den Bearbeitungsmodus zum ersten Mal aufrufen. Folgen Sie den Anweisungen zur Durchführung des Updates.
2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Software-Version zu überprüfen:
 - a. Klicken Sie auf das **Bearbeitungswerkzeug** 
 - b. Klicken Sie auf **System** im oberen, horizontalen Menü
 - c. Klicken Sie auf **Über** in dem linken, vertikalen Menü
 - d. Wenn Ihre **Versionsnummer** 1.20.2#### lautet, sind Sie bereit für die Migration

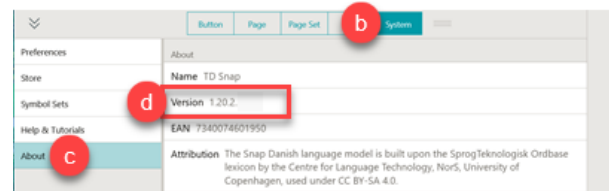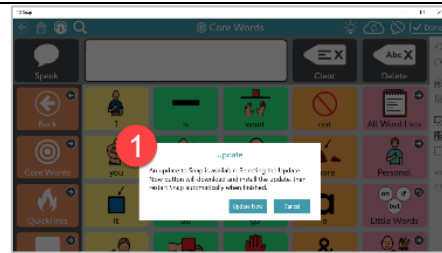

Durchführung des Migrationsprozesses

Sobald die Migrationsfunktion verfügbar ist, werden Sie per E-Mail und in der TD Software benachrichtigt. **Eine Internetverbindung ist erforderlich.**

Migrationsprozess (sobald verfügbar):

1. Wenn Sie die TD Snap Software öffnen, wird am oberen Bildschirmrand eine temporäre **Benachrichtigung** angezeigt, die auf die Notwendigkeit der Migration hinweist.
2. In der oberen Menüleiste werden Sie zudem ein **rotes Dreieck** sehen. Wenn Sie mit dem WLAN verbunden und bereit für die Migration sind, klicken Sie auf das **rote Dreieck**.
3. Sie werden eine Benachrichtigung über die Notwendigkeit der Migration erhalten. Klicken Sie auf Start.

TD Snap wird automatisch die neue Version herunterladen und installieren sowie alle Benutzerdaten (Benutzer, Seitensets, Einkäufe, usw.) übernehmen. Dieser Prozess wird auch die neue Version installieren sowie die alte Version deinstallieren. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden Sie die neue Version von TD Snap mit all Ihren Informationen und Inhalten genauso vorfinden, wie Sie es gewohnt sind.

