




iPadOS - Einrichtung ohne Code

Wir haben iPadOS 18 intensiv getestet.

Sie können das Update nun durchführen, wir bitten aber um Beachtung von folgendem Hinweis:

Wir liefern unsere Talk Pads grundsätzlich ohne Bildschirm-Entsperrcode/iPad-Code aus. Nach größeren iPadOS-Updates (wie in diesem Fall) wird man automatisch zur Einrichtung eines solchen Codes aufgefordert. Wir empfehlen dringend, diesen nicht einzurichten. Das Gerät wird nach sechsmaliger Falscheingabe des Codes deaktiviert und Ihre Daten gehen verloren.

Nachdem Sie das Update durchgeführt haben, werden Sie unter anderem aufgefordert, einen iPad-Code zu vergeben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen solchen Code nicht einzurichten! Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

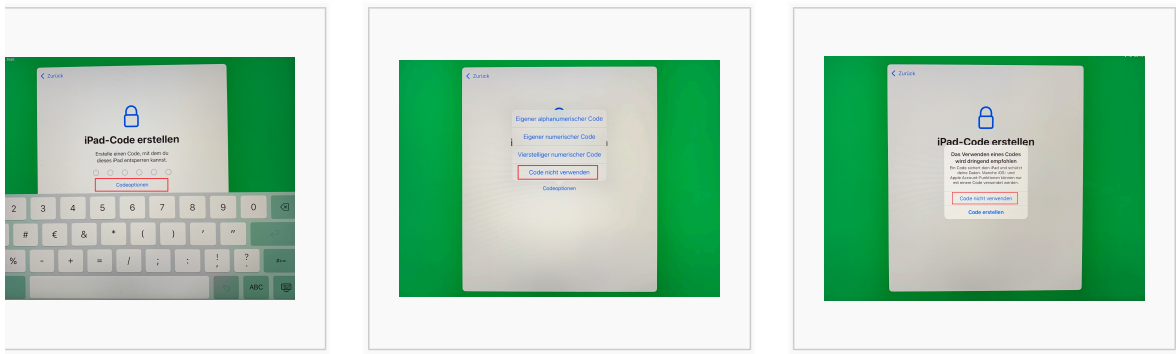

Im Fenster *iPad-Code erstellen* wählen Sie in den Codeoptionen *Code nicht verwenden*. Um die Codeoptionen anklicken zu können, müssen Sie ggf. die Tastatur mit der Taste unten rechts ausblenden.

Im nachfolgenden Fenster bestätigen Sie Ihre Auswahl nochmals mit *Code nicht verwenden*.

Weitere wichtige HINWEISE: Wir empfehlen außerdem, die TouchID nicht zu verwenden und die iPad-Analyse nicht mit Apple zu teilen.

Sie werden nach Abschluss der Einrichtung Ihres Gerätes nochmals aufgefordert, in den Einstellungen einen iPad Code zu erstellen. Bitte wählen Sie auch hier *Code nicht verwenden*. Sollten Sie nochmals aufgefordert werden, eine Touch ID einzurichten, wählen Sie ebenfalls *nicht verwenden*.